

AeroKat komora aerozolowa dla kotów

Cena: 359,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Komora aerozolowa AeroKat to produkt opracowany z myślą o kotach przeznaczony do stosowania z dozownikiem aerozolowym zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii w celu podawania kotom cierpiącym na astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub alergiczny nieżyt nosa leków w formie aerozolu.

Komorę AeroKat* dla kotów dzięki uniwersalnemu portowi można stosować ze wszystkimi powszechnie przepisywanymi lekami wziewnymi, które weterynarz określi jako odpowiednie dla kota (z wyjątkiem inhalatorów proszkowych).

Antystatyczna komora zatrzymuje lekarstwo i daje kotu więcej czasu na inhalację. Zawór inhalacyjny jest bardzo czuły i zaprojektowany tak aby reagować na niewielkie objętościowo i krótkie wdechy kota.

Stosowanie leków podawanych wziewnie umożliwia ich ukierunkowane dostarczenie do płuc i wpływa na ograniczenie działania niepożądanego obserwowanego u kotów leczonych lekami ogólnoustrojowymi.

Komora ze wskaźnikiem Flow-Vu* daje pewność, że kot otrzymuje niezbędną dawkę lekarstwa. Wskaźnik na komorze pomaga ponadto policzyć liczbę oddechów wziętych przez zwierzę, upewnić się, że maska dobrze przylega do pyska kota i że lek dostanie się do najgłębszych obszarów płuc kota.

Do każdego egzemplarza dołączone są dwie maski w różnych rozmiarach.

Objawy astmy u kota:

- uporczywy kaszel
- częste sapanie
- otwarte pyszczek lub trudności w oddychaniu

Kocia astma występuje mniej więcej u jednego kota na sto, jednak przypadków może być więcej gdyż jest ona często mylona z kulkami włosowymi. Astma występuje zazwyczaj u kotów w wieku 2-8 lat, częściej występuje u ras syjamskich i himalajskich.

Sposób użycia:

1. Zdjąć nasadkę z dozownika aerozolu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do dozownika aerozolu.
2. Włożyć dozownik aerozolu do tylnej części komory. Przytrzymać mocno komorę aerozolową oraz dozownik aerozolu i szybko potrząsnąć urządzeniem 4 do 5 razy bezpośrednio przed każdym użyciem.
3. Delikatnie umieścić maskę na pyszczku kota i upewnić się, że jest ona skutecznie uszczelniona. Podczas gdy kot wykonuje wdech,

wskaźnik przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) powinien trzepotać lub poruszać się w kierunku kota. Jeśli zwierzę cierpi z powodu niepokoju podczas wykonywania tych czynności, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

4. Gdy kot przestaje wdychać lub gdy wykonuje wydech Flow-Vu* IFI powraca do pozycji pionowej.

5. Podczas gdy kot wykonuje wdech, nacisnąć dozownik aerozolu i przytrzymać maskę na jego pyszczku przez 5-6 oddechów. Utrzymać skuteczne uszczelnienie i użyć Flow-Vu* IFI do policzenia liczby oddechów. Należy upewnić się, że przestrzegane są instrukcje weterynarza dotyczące dawkowania i że jednorazowo podawana jest tylko jedna dawka leku.

6. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dozowniku aerozolu dotyczącymi czasu oczekiwania przed powtórzeniem kroków 2-5.

Komora aerozolowa AeroKat* dla kotów jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić jego prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z instrukcją. NIE WOLNO go czyścić w zmywarce.

Instrukcja czyszczenia:

1. Komorę AeroKat* należy czyścić przed pierwszym użyciem, a następnie co tydzień.

2. Zdjąć tylko tył, adapter maski i maskę. NIE WOLNO próbować usuwać żadnych innych części.

3. Namoczyć wszystkie części w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń i letniej czystej wody przez 15 minut. Delikatnie mieszać tam i z powrotem.

4. Wypłukać części w czystej wodzie.

5. Strząsnąć nadmiar wody z wypłukanych części i pozwolić im wyschnąć na powietrzu ustawiając je w pozycji pionowej.

6. Przed ponownym montażem upewnić się, że części są suche. Nie wycierać do sucha.

7. Gdy urządzenie jest całkowicie suche i gotowe do użycia, należy ponownie zamocować tył, adapter maski i maskę.