

# Corega Super Mocny - krem mocujący do protez - mocno miętowy 40g

Cena: 20,70 pln



## Opis słownikowy

Producent	GlaxoSmithKline
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Krem mocujący do protez całkowitych i częściowych Corega Super Mocny to preparat zapewniający wyjątkowo silne trzymanie i umocowanie protezy na cały dzień. Tubka posiada unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację produktu.

Nawet jeśli proteza jest dobrze wykonana i dopasowana, stosowanie kremu mocującego Corega pomoże zapewnić utrzymanie i stabilizację protezy, co pozwoli spożywanie twardych i włóknistych pokarmów, ponadto krem Corega pomoże zapobiec dostawaniu się resztek jedzenia pod protezę.

### Sposób aplikacji:

Protezę umyć, wysuszyć i nanieść na nią krótkie paski kremu zachowując odstęp od krawędzi.

Wypluć jamę ustną i założyć protezę, docisnąć ją i przygrzyć na kilka sekund.

W celu usunięcia protezy należy jamę ustną przepłukać wodą i wyjmować protezę powoli przy jednoczesnym jej poruszaniu. Następnie usunąć pozostałości kremu z jamy ustnej i protezy przy użyciu miękkiej szczoteczki i ciepłej wody a później tabletek do czyszczenia protez.

**Smak:** mocno miętowy

**Pojemność:** 40g

