

# SCHÜLKE Perform do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych 40 g saszetka

Cena: 5,70 pln



## Opis słownikowy

Producent	Schulke-Mayr
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Zalety preparatu:

- na bazie nadsiarczanu potasu,
- bez aldehydów i związków amoniowych,
- rozpuszczalny w bieżącej wodzie,
- roztwór roboczy bezbarwny,
- może być też stosowany wobec materiałów o wysokich wymogach np. inkubatory, powierzchnie ze szkła akrylowego, wszystkie rodzaje wycisków stomatologicznych,
- aktywność roztworu roboczego 30 godzin,
- spektrum działania: B (w tym TbC), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Vaccinia, Rota, Papova SV 40 ) - 10 minut, V (Polio), - 15 minut, S - 15 minut,
- dobra tolerancja materiałowa,
- nietoksyczny roztwór użytkowy,
- możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków (np. inkubatory - opinia IMiD),
- produkt CE.

### Typ preparatu:

Wysoko wydajny preparat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych [CE 0297] i wyposażenia medycznego, na bazie aktywnego tlenu, który uwalniany jest w trakcie rozpuszczania się granulatu w wodzie.

### Zakres zastosowania:

Dezynfekcja i czyszczenie wyrobów medycznych [CE 0297] oraz wyposażenia medycznego wycieranych na mokro powierzchni, we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach klinicznych i medycznych. Ze względu na niezwykle szerokie spektrum działania mikrobiologicznego oraz przyjazne dla środowiska właściwości perform nadaje się doskonale do wszelkich zastosowań w obszarach ryzyka, w których oprócz szerokiego spektrum działania środków do dezynfekcji powierzchni stawiane są wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska i wygody użytkownika. Dzięki wielokrotnie potwierdzonej w testach, dobrej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat perform® można stosować również wobec materiałów stwarzających zwykle problemy, jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory). perform® stosowany jest także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji oraz manekinów używanych do ćwiczeń (dezynfekcja przez zanurzenie).

#### Dane dotyczące produktu:

100g preparatu perform® zawiera: 45 g pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siaraczan). Pozostałe składniki (oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE nr 648/2004): 5-15% anionowe związki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, < 5% fosfoniany, < 5% składniki myjące, substancje zapachowe.