

Podstawowe zalecenia przy używaniu wyrobów przeciw-żylakowych / pończosznych

Przypominamy:

Pończosznicze wyroby przeciw-żylakowe (rajstopy, skarpety, pończochy, podkolanówki) najlepiej zakładać zaraz po wstaniu, ponieważ wtedy nogi są jeszcze bez obrzęków. Należy wywrócić wyrób na lewą stronę aż do stopy. Następnie włożyć część stopową na palce, a później na podbicie i piętę, i ostrożnie naciągnąć pozostałą część wyrobu na łydkę.

Ważne jest aby stopy były odpowiednio wypielęgnowane, bez zrogowaceń i pęknięć. Podczas użytkowania produktów pończoszniczych wskazane jest częste stosowanie pumeksu lub pilnika do pięt aby zapewnić stopom gładkość.

Najlepiej będzie, gdy przy nakładaniu użyjemy gospodarczych rękawic gumowych i zdejmieni biżuterię, by nie uszkodzić dzianiny.

Wyroby pończosznicze najlepiej prać, używając do tego ogólnie dostępnych środków do tkanin delikatnych. Temperatura wody nie powinna być wyższa niż 30-40 st. C. Nie polecamy stosowania płynów zmiękczających. Wyroby należy dokładnie wypłukać, ale nie wolno wyżywać, wykręcać i suszyć na grzejniku ani prasować. Najlepiej suszyć je na powietrzu na płasko, nie należy używać suszarki. Nie wolno prasować.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe przy nie stosowaniu się do przeciwwskazań.

Hurtownia Art. Medycznych i Opatrunkowych Magazyn Główny



37-122 Albigowa 1054A, tel./fax. 17.2250122
biuro@dlapacjenta.pl

