

UrgoStart Contact opatrunek kontaktowy 15x20cm - 1 szt.

Cena: 84,35 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Miękki i elastyczny opatrunek kontaktowy UrgoStart Contact to, który łatwo dopasowuje się do rany i zbudowany jest z macierzy gojącej TLC-NOSF, dzięki czemu znacząco skraca czas leczenia rany.

Wskazania:

- rany głębokie lub nietypowo usytuowane, także podczas odprowadzania wysięku z ran głębokich
- niezainfekowane rany przewlekłe: owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- w leczeniu niegojących się ran ostrych
- leczenia ran otoczonych tzw. "skórą pergaminową"

Właściwości:

- utrzymuje optymalnie wilgotnego środowiska sprzyjającego procesowi gojenia ran-
- nie przywiera do rany, zalecany do stosowania w leczeniu ran otoczonych tzw. "skórą pergaminową"
- duża elastyczność ułatwia aplikację nawet na rany trudno dostępne
- dzięki macierzy gojącej TLC-NOSF skraca czasu leczenia
- nie powoduje uszkodzeń nowo powstałych tkanek
- bezbolesna i bezurazowa zmiana

Sposób aplikacji:

Oczyścić ranę przy zachowaniu obowiązujących procedur. Jeśli wcześniej użyty został antyseptyk ranę ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

Zdjąć z opatrunku folię ochronną i przyłożyć go bezpośrednio do rany.

Produkt można dociąć według indywidualnych potrzeb, tak aby był 1-2 cm większy od brzegów rany.

UrgoStart Contact wymaga zastosowania opatrunku wtórnego, który dopasowuje się w oparciu o lokalizację rany i stopień wysięku, mogą to być opatrunki piankowe UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.



Kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.

dlpacjenta.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlpacjenta.pl

Rozmiar: 15x20 cm