

## UrgoTul Absorb Border opatrunek piankowy 10x10cm - 1 szt.



Cena: 13,95 pln

### Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Piankowy, samoprzylepny opatrunek wskazany do stosowania na rany z umiarkowanym i dużym wysiękiem wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej).

Produkt zbudowany jest z miękkiej, przylepnej warstwy TLC połączonej z miękką wkładką chłonną z przepuszczalnej dla gazów poliuretanowej pianki i cienkiej, wodoodpornej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach.

#### Wskazania:

- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne

#### Właściwości:

- warstwa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- wykazuje wysoki stopień chłonności, co zapobiega maceracji skóry
- stymuluje proliferację fibroblastów
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- dobrze dopasowuje się do różnych kształtów rany
- łatwy i wygodny w aplikacji i używaniu
- nie przywiera do rany, nie niszczy nowo powstałej tkanki
- jest wodoodporny
- nie wymaga wtórnego przytrzymania opatrunku, pozostaje na miejscu po nałożeniu
- chroni skórę wokół rany
- przebadany klinicznie

#### Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku, ranę należy ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

W celu poprawienia adhezji opatrunku, odtłuścić i osuszyć skórę wokół rany.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą stronę przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Samoprzylepny silikonowy brzeg powinien znajdować się min. 1 cm od rany.

W zależności od stopnia wysięku i jej stanu klinicznego, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni. W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border może być stosowany jako opatrunek wtórny po uprzednim zaopatrzeniu rany innym opatrunkiem np. UrgoClean, AugoClean Ag lub Urgotul Ag/Silver, a także stosowany samodzielnie na rany bez cech infekcji.

**Rozmiar:** 10x10 cm

**Rozmiar warstwy chłonnej:** 5,9x5,9 cm