

UrgoTul Absorb Border Sacrum opatrunek piankowy 20x20cm - 1 szt.

Cena: 49,70 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | URGO Polfa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opatrunek piankowy UrgoTul Absorb Border Sacrum z samoprzylepnym, silikonowym brzegiem wykonany w technologii TLC (lipidokoloidowej) wskazany do stosowania na rany z dużym lub umiarkowanym wysiękiem.

Wyrób zbudowany jest z miękkiej, przylepnej warstwy TLC połączonej z miękką wkładką chłonną z przepuszczalnej dla gazów poliuretanowej pianki i cienkiej, wodoodpornej, samoprzylepnej warstwy silikonowej na brzegach.

Wskazania:

- rany przewlekłe: owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej, odleżyny
- rany ostre: rany pooperacyjne, oparzenia, rany pourazowe, otarcia skóry

Właściwości:

- wykazuje wysoki stopień chłonności, dzięki czemu zapobiega maceracji skóry
- stymuluje proliferację fibroblastów
- warstwa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- żelująca matryca TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- nie przywiera do rany, nie niszczy nowo powstałej tkanki, chroni skórę wokół rany
- łatwy i wygodny w aplikacji i użytkowaniu
- dobrze dopasowuje się do różnych kształtów rany
- nie wymaga wtórnego przytrzymania opatrunku, pozostaje na miejscu po nałożeniu
- wodoodporny
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku, ranę należy ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

W celu poprawienia adhezji opatrunku, odtłuścić i osuszyć skórę wokół rany.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą stroną przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Samoprzylepny silikonowy brzeg powinien znajdować się min. 1 cm od rany.

W zależności od stopnia wysięku i jej stanu klinicznego, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni. W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border może być stosowany jako opatrunek wtórny po uprzednim zaopatrzeniu rany innym opatrunkiem np. UrgoClean, AugoClean Ag lub Urgotul Ag/Silver, a także stosowany samodzielnie na rany bez cech infekcji.

Rozmiar: 20x20 cm

Rozmiar warstwy chłonnej: 12,6x14,3 cm