

AeroHippus komora aerozolowa dla koni



Cena: 809,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

AeroHippus to opatentowana komora do podawania aerozoli dla koni opracowana z myślą o koniach cierpiących na choroby układu oddechowego, takie jak:

Zapalna choroba układu oddechowego: przewlekły, przerywany kaszel, zwiększone gromadzenie się śluzu w drogach oddechowych i zmniejszona wydajność. Może wystąpić u koni w każdym wieku, z objawami klinicznymi przeważnie subtelnymi w spoczynku.

Nawracająca choroba układu oddechowego: choroba dolnych dróg oddechowych, prowadząca do kaszlu i ograniczenia sprawności. Zwykle dotyczy to koni dojrzałych lub starszych.

Właściwości:

- lekka, praktyczna komora o niewielkim rozmiarze ułatwiająca przenoszenie i objętości 198 ml
- łatwa w użyciu i utrzymaniu czystości
- uniwersalny rozmiar odpowiedni zarówno dla źrebięcia, jak i dorosłego konia
- niełamliwy, antystatyczny polimerowy korpus zapewniający dostanie się leku do głęboko do płuc zwierzęcia
- wskaźnik Flow-VU pozwalający monitorować liczbę oddechów konia i dający pewność, że koń wdycha wskazane przez weterynarza leki

Komora stosowana jest poprzez umieszczenie maski na jednym z nozdrzy konia. Po ściśnięciu inhalatora duże cząsteczki oddzielane są od małych, które nadają się do wdychania. Opracowano ją w celu dostarczania koniom optymalnej dawki leku.

Produkt posiada uniwersalny port umożliwiający stosowanie ze wszystkimi powszechnie przepisywanymi lekami wziewnymi, które weterynarz określi jako odpowiednie dla konia (z wyjątkiem inhalatorów proszkowych).

Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt pod kątem montażu, uszkodzeń, brakujących części lub obecności ciał obcych. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń niezwłocznie wymienić produkt.

1. Zdjąć nasadkę z dozownika aerozolu. Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi dozownika aerozolowego.

2. Włożyć dozownik aerozolu do tylnej części komory. Mocno trzymać komorę AeroHippus* oraz dozownik aerozolu i dokładnie wstrząsnąć urządzeniem przed każdym użyciem (cztery do pięciu razy).

3. Ostrożnie umieścić maskę na jednym nozdrzu konia i upewnić się, że jest dobrze dopasowana.
4. Kiedy koń wykonuje wdech, wskaźnik przepływu wdechowego Flow-Vu* w jaskrawym kolorze powinien się unieść lub przesunąć w kierunku konia. Wskaźnik powróci do pozycji pionowej, gdy tylko koń przestanie wdychać lub wydychać powietrze. Jeśli procedura wywołuje panikę lub niepokój u zwierzęcia należy skonsultować się z weterynarzem.
5. W trakcie wykonywania przez konia wdechu, nacisnąć dozownik aerozolu i przytrzymać maskę w tej pozycji przez 3-5 oddechów. Utrzymać skuteczne uszczelnienie i liczyć oddechy za pomocą wskaźnika Flow-Vu*. Podczas użytkowania należy upewnić się, że przestrzegane są instrukcje lekarza weterynarii dotyczące dawkowania i że jednorazowo podawana jest tylko jedna dawka leku.
6. Przed powtórzeniem czynności 2-5 należy przestrzegać instrukcji dotyczących czasu oczekiwania podanego w inhalatorze i postępować zgodnie z zaleceniami.

Komora aerosolowa AeroHippus* dla koni jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić jego prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z instrukcją. NIE WOLNO go czyścić w zmywarce.

Instrukcja czyszczenia:

Komorę do podawania aerozolu dla koni należy czyścić przed pierwszym użyciem, a następnie co tydzień.

1. Zdjąć tylko tylną część i złącze maski. NIE zdejmować żadnych innych części.
2. Namoczyć wszystkie części w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń i letniej czystej wody na 15 minut i delikatnie zamieszać w przód i w tył.
3. Wypłukać części czystą wodą.
4. Strząśnij nadmiar wody i pozwól wyschnąć wypłukanym częściom na powietrzu ustawiając je w pozycji pionowej lub wysuszyć je miękką szmatką.
5. Przed ponownym montażem wszystkie części muszą być suche.
6. Gdy tylko urządzenie będzie całkowicie suche i gotowe do użycia, założyć tylną część i złącze maski.