

## Aparat do płukania oka APO



Cena: 23,40 pln

### Opis słownikowy

Producent	Stanmark
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Aparat do płukania oka APO przeznaczony jest do przepłukiwania czystą wodą zaprószonego czynnikiem obcym oczu. Może mieć zastosowanie w nagłych wypadkach w pracy, w podróży oraz w gospodarstwie domowym i powinien być ważnym elementem wyposażenia podręcznej apteczki pierwszej pomocy. Znajduje również zastosowanie w leczniczym przepłukiwaniu oczu np. wodnymi roztworami leków ocznych, rumianku itp.

**APO zbudowany jest z łatwych do demontowania, czyszczenia i ponownego montowania następujących elementów:**

- pojemnika `a 0,25 l z PE,
- wianienki z sitkiem z PS,
- pokrywki na wianienkę z PE,
- rurki (dreny medyczne) z PCV

Wszystkie elementy składowe APO wykonane są z bezpiecznych surowców dopuszczonych do produkcji sprzętu medycznego.

### Sposób użycia:

- odczepić wianienkę od pojemnika,
- pojemnik napełnić 250 ml wody,
- ponownie zamontować wianienkę na pojemnik, zdjęć pokrywkę,
- pochylić głowę i przyłożyć szczelnie krawędzie wianienki do oczodołu,
- ściskając dłonią pojemnik spowodować wypływ wody i przepłukanie zaprószonego oka do momentu usunięcia ciała obcego.
- po użyciu aparat przepłukać, osuszyć i umieścić w woreczku PE.

Aparat jest pakowany wraz z ulotką informacyjną w szczelnie zgrzanym woreczku z folii PE.