

Apteo paski do zamykania ran w kolorze białym 3mm x 75mm - 250szt. (50 saszetek)

Cena: 269,00 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | Apteo |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Sterylny paski w kolorze białym przeznaczone do nieinwazyjnego zamykania drobnych ran i cięć o różnej długości, pakowane w saszetkę w której znajduje się 5 pasków.

Właściwości:

- wytrzymałe
- elastyczne
- łatwe w użyciu
- hipoalergiczny klej
- dobrze przylegają do skóry
- kolor biały
- sterylne

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć ranę i skórę w jej pobliżu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Wyciągnąć z saszetki paski oraz odklejać pojedynczo z papieru ochronnego bezpośrednio przed użyciem.
3. Starannie zbliżyć do siebie brzoży rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
4. Przykleić kilka pasków w odległości około 2-3 mm od siebie.
5. W celu usunięcia paska, odkleić ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Środki ostrożności:

Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.
Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.

Opatrunek zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.

W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, pasek należy usunąć.

Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach u dzieci może wystąpić wysypka spowodowana ciepłem lub wilgocią, szczególnie na twarzy. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie: 250 pasków (50 saszetek) - 3mm x 75mm