

Apteo paski do zamykania ran, zestaw w kolorze cielistym - 14szt.



Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy




Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny


Opis produktu

Sterylny paski w kolorze cielistym przeznaczone do nieinwazyjnego zamykania drobnych ran i cięć, pakowane w saszetki, z których każda zawiera paski w innym rozmiarze.

Właściwości:

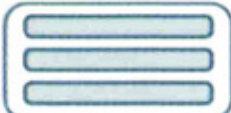- łatwe w użyciu
- elastyczne
- wytrzymałe
- dobrze przylegają do skóry
- hipoalergiczny klej
- sterylne
- kolor cielisty

6 mm x 75 mm		3 saszetki	3 paski
3 mm x 75 mm			5 pasków
6 mm x 38 mm		14 pasków	6 pasków

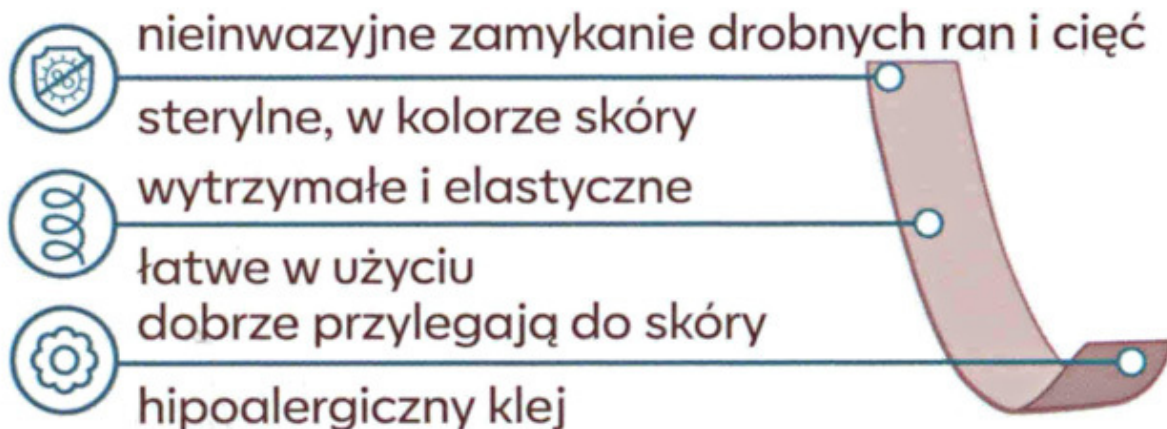

Sposób użycia:

1. Oczyszczyć ranę i skórę w jej pobliżu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Wyciągnąć z saszetki pasek oraz odklejać pojedynczo z papieru ochronnego bezpośrednio przed użyciem.
3. Starannie zbliżyć do siebie brzoży rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
4. Przykleić kilka pasków w odległości około 2-3 mm od siebie.
5. W celu usunięcia paska, odkleić ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Środki ostrożności:

Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.

Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.

Opatrunek zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.

W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, pasek należy usunąć.

Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach u dzieci może wystąpić wysypka spowodowana ciepłem lub wilgocią, szczególnie na twarzy. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie: 14 sztuk (3 saszetki):

- 3 paski (1 saszetka) - 6mm x 75mm
- 5 pasków (1 saszetka) - 3mm x 75mm
- 6 pasków (1 saszetka) - 6mm x 38mm

