

# Best Barrier paskowy test kontroli sterylizacji parą wodną - 250 szt.

Cena: 44,80 pln



## Opis słownikowy

Producent	Anhui Harmony Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Integrator chemiczny KDL klasy IV to wskaźnik przeznaczony do kontroli sterylizacji parowej. Wyrób użytkowany zgodnie z instrukcją daje czytelny obraz i określa czy spełnione zostały warunki sterylizacji,

W trakcie sterylizacji parowej wskaźnik zmienia kolor (na końcu paska) z żółtego na czarny.

Nie należy używać wskaźnika jeśli jego kolor przed sterylizacją jest inny niż żółty.

### Sposób użycia:

1. Wskaźnik umieścić w każdym pakiecie, który ma zostać poddany sterylizacji. Należy go umieścić w miejscu które jest uznane za najtrudniejsze do spenetrowania przez parę. Jeśli sterylizacji poddaje się duże pakiety wskaźniki zaleca się umieścić w kilku miejscach.
2. Przeprowadzić sterylizację pakietu.
3. Po zakończeniu procesu sterylizacji, sprawdzić czy kolor na wskaźniku zmienił kolor z żółtego na czarny.

Wskaźników chemicznych nie należy używać zamiast wskaźników biologicznych, które także należy używać zgodnie z odpowiednimi przepisami i zarządzeniami.

Wskaźnika nie zaleca się kłaść na powierzchniach na których łatwo zbiera się para (szkło, metal) gdyż mogą zamoknąć, a otrzymany wynik może być niepoprawny.

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, przy wilgotności powietrza 30-60%. Chronić przed zamoknięciem.

**Rozmiar wskaźnika:** 16 cm x 1,5 cm

Każdy wskaźnik posiada poprzeczną perforację w połowie długości, co umożliwia łatwe podzielenie na dwie części po 8 cm.

**Opakowanie zbiorcze:** 250 szt. testów długości 16 cm (500 szt. testów długości 8 cm)