

# Corega Super Mocny - krem mocujący do protez - neutralny 40g

Cena: 20,70 pln



## Opis słownikowy

Producent	GlaxoSmithKline
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Krem mocujący do protez całkowitych i częściowych **Corega Super Mocny** o neutralnym smaku zapewnia wyjątkowo silne trzymanie protezy przez cały dzień.

Tubka posiada unikalną końcówkę, która ułatwia aplikację kremu.

Nawet jeśli proteza jest dobrze wykonana i świetnie pasuje, stosowanie kremu mocującego Corega pomoże zapewnić jej utrzymanie i stabilizację, dzięki czemu będziesz mógł jeść twarde i włókniste pokarmy. Corega pomoże również zapobiec dostawaniu się drażniących resztek pokarmu między protezę a dziąsła.

### Sposób aplikacji:

Protezę umyć, wysuszyć i nanosić na nią krótkie paski kremu zachowując odstęp od krawędzi.

Wypluć jamę ustną i założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

W celu usunięcia protezy należy jamę ustną przepłukać wodą i wyjmować protezę powoli przy jednoczesnym jej poruszaniu. Następnie usunąć pozostałości kremu z jamy ustnej i protezy przy użyciu miękkiej szczoteczki i ciepłej wody a później tabletek do czyszczenia protez.

**Smak:** neutralny

**Składniki:** calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum

**Pojemność:** 40g