

## Dr Helewa Torba na WC, sedes, toaletę, nocnik - 20szt



Cena: 117,90 pln

### Opis słownikowy

Opakowanie	20 szt.
Producent	Dr Helewa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Torba na WC, sedes, basen czy toaletę do stosowania, w celu ochrony toalety, deski czy basenu przed zabrudzeniami i wydzielinami.

Na dnie posiada wkładkę absorbującą stolec i mocz (600 ml / 20 uncji).

Torba i wkładka absorbująca są hipoalergiczne i zostały przebadane dermatologicznie, pacjent z nich korzystający może bezpiecznie używać produktu nawet w przypadku zwiększonej częstotliwości użytkowania.

Wyrób jest gotowy do użycia.

#### Wskazania:

- izolacji zakażonego pacjenta, w celu badań czynnościowych lub leczenia środkami biobójczymi (markery, chemioterapia itp.).
- w przypadku zabronienia przepisami zrzutów do systemów wodnych.
- do wszystkich typów dużych wiader, do krzeseł toaletowych lub basenów sanitarnych (duże modele dla pacjentów otyłych), basenów i muszli klozetowych i toalet przenośnych.

Opakowanie: 20 szt

**Sposób użycia:**

Otworzyć pudełko i oderwać z rolki pierwszą torbę.

Założyć torbę na muszlę klozetową, basen lub przenośną toaletę.

Usiąść i skorzystać z WC - bez splukiwania.

Po użyciu zdjąć torbę z zawartością, pociągnąć za sznurki ściągnające i zawiązać węzeł (jeśli zaistnieje potrzeba, to węzeł zawiązać na samej torbie).

Zużytego produktu nie wyrzucać do WC. Usuwać jako odpady zmieszane lub zgodnie z obowiązującym protokołem.