

## Drabinka rehabilitacyjna sznurowa SANITY - 6 szczebli

Cena: 90,00 pln



### Opis słownikowy

Producent	Albert
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Sznurowa drabinka łóżkowa z 6 drewnianymi szczeblami wspiera rehabilitację i przyspiesza powrót do zdrowia osób chorych, wspomaga codzienną pielęgnację pacjenta, jego samodzielne funkcjonowanie, zwiększenie możliwości fizycznych i odciąża kręgosłup osoby się nim opiekującej, jest to propozycja nie tylko dla pacjenta ale również dla dla osób sprawujących nad nimi opiekę.

#### Zastosowanie:

- wspomoczenie aktywizującej pielęgnacji pacjenta
- ułatwienie podnoszenia się i zmianę pozycji na siedzącą
- samodzielne poprawienie lub zmiana pozycję w łóżku, tym samym uniknięcie ryzyka powstania odleżyn
- podtrzymać się w trakcie przeprowadzania różnych czynności jak np. poprawianie poduszki lub samodzielne przełożenie nóg na brzeg łóżka aby usiąść na jego skraju
- do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych wzmacniających mięśnie rąk, pleców i ramion.
- wsparcie w głębokim oddychaniu (zapobieganie zapaleniom płuc)

Długość drabinki (ok. 1,80 m) umożliwia na zamontowanie niemal na każdym rodzaju łóżka, nie tylko na łóżku pielęgnacyjnym. Drabinkę mocuje się poprzez przywiązanie wystających odcinków linki na jej końcu do łóżka. Aby wyrób nie sięgał podłogi, można go skrócić, przez przełożenie poszczególnych szczebli przez siebie – np. trzeci szczebel przełożyć przez szósty.

#### Bezpieczeństwo:

Wyrób należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Przed zastosowaniem drabinki sprawdzić czy jest ona prawidłowo zamocowana. w przypadku osób porażonych połowicznie przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub z wykwalifikowanym personelem pielęgnującym.

Dzieci oraz osoby niepełnosprawne umysłowo mogą korzystać z przyrządu wyłącznie pod ścisłą kontrolą osoby dorosłej, w pełni władz umysłowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo.

#### Czyszczenie i konserwacja:

W przypadku pojawienia się zabrudzeń drabinkę należy umyć wodą z mydłem.

Do dezynfekcji używać miękkiej ściereczki nasączonej alkoholem. Nie sterylizować w autoklawie ani przy użyciu kuchenki mikrofalowej.

**Wymiary:**

- całkowita długość: ok. 180 cm
- szerokość szczebli: 30 cm
- średnica szczebli: 2 cm
- ilość szczebli: 6
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- materiał: szczeble - drewniane, lakierowane; lina - polipropylenowa.