

Dwubloczkowy zestaw do ćwiczeń wspomaganych kończyn górnych dwubloczkowy Timago PullTIM

Cena: 45,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Timago
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Dwubloczkowy zestaw do ćwiczeń wspomaganych kończyn górnych, barków i górnej części tułowia, który wspomaga zwiększenie ruchliwości w stawach i odbudowę zakresu ruchów.

Wskazania:

- przywrócenie funkcji motorycznych
- rekonstrukcja prawidłowego wzorca ruchowego, problemy neurologiczne
- odbudowa zakresu ruchów w stawach kończyn górnych
- przykurcz lub zanik mięśniowy spowodowany długotrwałym usztywnieniem np. po zdjęciu opatrunku gipsowego lub zabiegu operacyjnym

Właściwości:

- zawiera linki, bloczki oraz uchwyty na ręce
- przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych, barków oraz górnej części tułowia
- opór dla jednej kończyny stanowi ciężar drugiej kończyny
- łatwy w instalacji i użytkowaniu

Montaż i regulacja:

1. Wsunąć pierwszy bloczek na stronę A ramienia w kształcie litery V i przesunąć do miejsca blokady.
2. Na stronę B ramienia wsunąć drugi bloczek i przesunąć do miejsca blokady.
3. Zamocować ramię V na klamrze mocującej przez umieszczenie stron A i B ramienia w odpowiednich otworach montażowych.
4. Za pomocą klamry mocującej zawiesić przyrząd na drzwiach.
5. Przeciągnąć linkę przez bloczki.

6. Końcówki linki przeciągnąć przez środkowe otwory w rączkach i mocno zawiązać na odpowiedniej wysokości.
7. Przed użyciem sprawdzić przyrząd i upewnić się, że wszystkie części są bezpieczne, linka nie wykazuje oznak nadmiernego zużycia i można bezpiecznie korzystać z przyrządu.

Przyrząd może być używany z jedną rączką i niewielkim ciężarkiem przymocowanym do przeciwległego końca linki.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoby, niebędące w stanie samodzielnie się poruszać, nie powinny korzystać z tego produktu bez pomocy osób trzecich.

Części przyrządu:

- ramię w kształcie litery V
- klamra mocująca na drzwi
- linka
- dwa bloczki
- dwa uchwyty

Waga: 0,68 kg

Maksymalne obciążenie bloczka: 5 kg

Szerokość drzwi: 3,5 - 4,15 cm

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar