

Elektroda skarpetka do elektrostymulatora 3 w 1 TENS EMS MASAŻ Balanssen



Cena: 49,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Skarpetka do elektrostymulatora Balanssen 3w1 Tens EMS Masaż, która umożliwia skupienie się na problematycznym obszarze stopy.

Do działania elektrod niezbędne jest urządzenie do elektrostymulacji 3w1 TENS EMS MASAŻ Balanssen, nie działają one samodzielnie. Elektroda i skarpetka przeznaczone są do terapii prądami tens i elektrostymulacji.

Zestaw zawiera skarpetkę i jedną dużą, samoprzylepną elektrodę, którą należy przykleić na oczyszczoną skórę w miejscu 3-4 cm powyżej założonej na stopę skarpetkę. Następnie skarpetę i elektrodę należy podłączyć do elektrostymulatora i wybrać preferowany program.

Wskazania:

- Płaskostopie
- Obrzęki pooperacyjne
- Zapalenie stawów stopy
- Zaburzenia czucia
- Zaburzenia ukrwienia stopy
- Schorzenia wymagające poprawy ruchomości stopy
- Zespoły bólowe stopy

Przeciwwskazania:

Elektrostymulacji TENS nie powinno się przeprowadzać w przypadku ciąży, wad serca, rozrusznika serca, uszkodzonego mięśnia sercowego, arytmii, chorób psychicznych i emocjonalnej niestabilności, epilepsji oraz u dzieci poniżej 12 roku życia.

Rozmiar skarpetki: uniwersalny

Materiał: poliester

Kolor: biały

Zawartość zestawu:

elektroda 5 x 10 cm - 1 sztuka (wielokrotnego użytku)

elektroda skarpetka - 1 sztuka

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

