

Enkides CARE (OneCare) rękawice myjące z kremem barierowym 10szt.



Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	KAF GRUP
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Rękawice myjące z dodatkiem kremu barierowego, który w miejscu zastosowania pozostawia warstwę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi lub efektami nietrzymania moczu.

Produkt przeznaczony jest do mycia i pielęgnacji pacjentów intensywnej opieki medycznej, obłożnie chorych, ze specjalnymi potrzebami lub o ograniczonej mobilności, którym zapewnia kompleksową pielęgnację.

Dodatkowo rękawice pomagają w pielęgnacji przeciwdrożynowej, pomagają blokować tworzenie się ciśnienia wrzodowego i zatrzymać macerację skóry.

Sposób użycia:

Otworzyć opakowanie. Nałożyć rękawicę na dłoń i stosować na części ciała, które mają być myte. Używać jednej myjki do każdej konkretnej części ciała.

Produkt jednorazowy o właściwościach myjących i pielęgnujących. Nie wymaga aktywacji wodą ani spłukiwania. Przed i po użyciu nie łączyć z innymi środkami do mycia.

W celu zwiększenia komfortu użytkowania, produkt można podgrzać w kuchenie mikrofalowej. Włożyć opakowanie do mikrofalówki, zostawić na 20 sekund przy mocy 700W. Sprawdzić temperaturę rękawicy. Nie podgrzewać w temperaturze wyższej niż 35-40°C.

Nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone. Nie stosować na rany. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu produktu z oczami, przepłukać je wodą.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

U kobiet w ciąży i karmiących stosować pod kontrolą lekarza.

Po użyciu myjki utylizować jako odpady medyczne.

Skład: dimetikon, chlorek linoleamidopropylo PG-dimonu (fosfolipid), glukozyd laurylowy, d-panthenol (prowitamina B5), allantoina, wyciąg z aloesu, polisorbat 20, EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferolu (witamina E), glukonian chlorheksydyny, gliceryna, nipaguard, substancje zapachowe, wyciąg z rumianku.

Wyrób medyczny kl. I

pH: 5.5

Opakowanie: 10 sztuk

UWAGA: produkt w nowym opakowaniu i pod nową nazwą

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Galeria

