

Gruszka silikonowa 75ml APTEO

Cena: 11,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Silikonowa gruszka o pojemności 75 ml z zaokrągloną końcówką zalecana do stosowania u dzieci od 6. miesiąca do 1. roku życia. Jej cechą charakterystyczną jest kształt przypominający pingwinka, dzięki czemu może być bardziej przyjazna w odbiorze przez małe dzieci. Zaletą wyrobu jest ponadto możliwość jej otworzenia i dokładnego umycia.

Gruszkę można stosować na dwa sposoby: do nosa w celu usunięcia wydzieliny kataralnej z nosa i zapobieganiu infekcjom górnych dróg oddechowych lub do uszu w celu usunięcia woskowiny i przeciwdziałaniu stanom zapalnym uszu.

Sposób użycia:

Przed każdym użyciem gruszkę należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie włożyć na 10 minut do gotującej się wody.

Stosowanie do nosa:

Gruszkę ścisnąć w dłoni, następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie wydzieliny z nosa.

Stosowanie do uszu:

Gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakropić ciecz do ucha. Nie wprowadzać miękkiej końcówki zbyt głęboko - należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ścianie kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę, aby pozbyć się cieczy. Procedurę powtórzyć.

Środki ostrożności:

Produkt przeznaczony do indywidualnego użytku.

Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki silikonowej powinna wykonywać osoba dorosła.

Gruszki silikonowej należy używać w sposób bardzo ostrożny, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Nie stosować środków dezynfekujących.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia oraz po upływie daty ważności.

Opakowanie: 1 sztuka