

JOYDIVISION Tampony bezsznureczkowe Soft-Tampons mini - 10szt.



Cena: 41,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	JoyDivision

Opis produktu

Bezsznureczkowe miękkie tampony Soft-Tampons sprawdzające się podczas miesiączki, idealnie sprawdzają się podczas aktywności takich jak pływanie, uprawiania sportu, korzystania z sauny czy seks.

Zaletą tamponów Soft-Tampons jest możliwość używania ich podczas pływania, tak samo jak w przypadku tamponów tradycyjnych. Mogą one ponadto ograniczyć przenikanie do pochwy chlorowanej lub potencjalnie zanieczyszczonej wody.

Produkt wykonany został z różowego, miękkiego medycznego materiału gąbkowego (poliuretan) który nie zawiera substancji chemicznych. Pianka posiada certyfikat OEKO-TEX i oznaczenie STANDARD 100, co zapewnia o przebadaniu pod kątem obecności szkodliwych substancji.

Kształt przypominający serce, który wpływa na zwężenie końcówki gąbki, natomiast dwa rozsunięte skrzydła tworzą pustą przestrzeń na spodzie, w której umieszcza się palec podczas aplikacji.

Tampony umieszczone są w wysokim pudełku ułatwiającym wyciągnięcie 1 sztuki. Każdy tampon pakowany jest pojedynczo.



Właściwości:

- elastyczny materiał dopasowuje się do kobiecej anatomii
- nie podrażniający ciała, higieniczny materiał
- ergonomiczny kształt
- dyskretne i wygodne
- bezpieczne w użytkowaniu
- łatwe w aplikacji i usuwaniu
- nie zawiera lateksu
- testowane dermatologicznie i klinicznie

Tampony Soft-Tampons znane są również jako:

- Sport-Tampons - brak sznureczka nie przeszkadza podczas uprawiania sportu i nie powoduje nieprzyjemnych otarć
- Tampon pływacki - miękki tampon który nie pęcznieje, jest dyskretny i niezauważalny.
- Sauna&Spa-Tampon - gąbka bez sznureczka zapewnia najwyższą dyskrecję, tampon optymalny do stosowania w saunie i w salonach SPA.
- Sex-Tampon - miękki materiał nie jest wyczuwalny przez partnera i zapobiega wyciekom krwi menstruacyjnej.

Tampony Soft-Tampons są wyrobem jednorazowego użytku, wielokrotne stosowanie może prowadzić do infekcji. Pod koniec menstruacji należy pamiętać o usunięciu ostatniego tamponu. Tampon nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Instrukcja aplikacji:

1. Umyć ręce.
2. Wyjąć tampon z opakowania.
3. W celu ułatwienia włożenia, nałożyć na suchy tampon odrobinę żelu nawilżającego lub czystej zwilżyć go czystą wodą. Przed włożeniem należy z tamponu wycisnąć wodę aby utrzymał maksymalną chłonność.
4. Przyjąć optymalną pozycję: usiąść na sedesie lub przykucnąć.
5. Tampon chwycić z boku dwoma palcami (kciukiem i palcem środkowym) i ścisnąć go, ściśnięcie spowoduje utworzenie na spodzie gąbki wgłębienia na palec, które ułatwi wprowadzenie tamponu aż do szyjki macicy.

Zaleca się wymianę tamponu co 4-6 godzin jednak czas noszenia tamponu należy dostosować do okresu: w cięższe dni zaleca się zmianę po 3-5 godzinach, w słabsze dni około 5-8 godzin. Maksymalny czas pozostawienia tamponu w pochwie wynosi 8 godzin.

Tampon należy wymienić natychmiast po odbyciu stosunku płciowego bez prezerwatywy.

Instrukcja wyjmowania:

1. Umyć ręce.
2. Przyjąć optymalną pozycję do usuwania tamponu, najlepiej przykucnąć (w pozycji kucznej długość pochwy ulega zmniejszeniu).
3. Chwycić tampon jednym palcem za uchwyt w kształcie klapki i go wyciągnąć.

W sytuacji kiedy tamponu nie uda się usunąć można zostawić go nieco dłużej i poczekać aż się prawidłowo wchłonie (łatwiej usuwa się w pełni wchłoniętą gąbkę). Pomocna może być relaksująca kąpiel lub przysiad i mocne pchanie (tak jak przy wypróżnieniu) co może pomóc w stopniowym zsunięciu gąbki w dół pochwy do momentu gdy uda się ją chwycić i wyciągnąć. Jeśli to nie pomoże należy udać się do ginekologa.

Szerokość w najszerszym miejscu: 4,5 cm

Długość: 5,2 cm

Wysokość: 2 cm

Opakowanie: 10 sztuk

Producent:

JOYDIVISION international AG

Wiesenauer Strasse 11

Hannover 30179

Niemcy

email@joydivision.de