

## JOYDIVISION Tampony bezsznureczkowe Soft-Tampons mini - 3szt.



Cena: 15,90 pln

### Opis słownikowy

Opakowanie	3 szt.
Producent	JoyDivision

### Opis produktu

Bezsznureczkowe miękkie tampony Soft-Tampons sprawdzające się podczas miesiączki, idealnie sprawdzają się podczas aktywności takich jak pływanie, uprawiania sportu, korzystania z sauny czy seks.

Tampon wykonany z różowego, miękkiego medycznego materiału gąbkowego (poliuretan) który nie zawiera substancji chemicznych. Pianka posiada certyfikat OEKO-TEX i oznaczenie STANDARD 100, co zapewnia o przebadaniu pod kątem obecności szkodliwych substancji.

Zaletą tamponów Soft-Tampons jest możliwość używania ich podczas pływania, tak samo jak w przypadku tamponów tradycyjnych. Mogą one ponadto ograniczyć przenikanie do pochwy chlorowanej lub potencjalnie zanieczyszczonej wody.

Kształt przypominający serce, który wpływa na zwężenie końcówki gąbki, natomiast dwa rozsunięte skrzydła tworzą pustą przestrzeń na spodzie, w której umieszcza się palec podczas aplikacji.



### Właściwości:

- nie podrażniający ciała, higieniczny materiał
- dyskretne i wygodne

- ergonomiczny kształt
- łatwe w aplikacji i usuwaniu
- bezpieczne w użytkowaniu
- testowane dermatologicznie i klinicznie
- nie zawiera lateksu
- elastyczny materiał dopasowuje się do kobiecej anatomii

**Tampony Soft-Tampons znane są również jako:**

- Sport-Tampons - brak sznureczka nie przeszkadza podczas uprawiania sportu i nie powoduje nieprzyjemnych otarć
- Tampon pływacki - miękki tampon nie pęcznieje, jest dyskretny i niezauważalny.
- Sauna&Spa-Tampon - gąbka bez sznureczka zapewnia najwyższą dyskrecję, tampon optymalny do stosowania w saunie i w salonach SPA.
- Sex-Tampon - miękki materiał nie jest wyczuwalny przez partnera i zapobiega wyciekom krwi menstruacyjnej.

**Instrukcja aplikacji:**

1. Przed aplikacją umyć ręce.
2. Wyjąć tampon z opakowania.
3. W celu ułatwienia włożenia, nałożyć na suchy tampon odrobinę żelu nawilżającego lub czystej zwilżyć go czystą wodą. Przed włożeniem należy z tamponu wycisnąć wodę aby utrzymał maksymalną chłonność.
4. Przyjąć optymalną pozycję: usiąść na sedesie lub przykucnąć.
5. Tampon chwycić z boku dwoma palcami (kciukiem i palcem środkowym) i ścisnąć go, ściśnięcie spowoduje utworzenie na spodzie gąbki wgłębienia na palec, które ułatwi wprowadzenie tamponu aż do szyjki macicy.

Zaleca się wymianę tamponu co 4-6 godzin jednak czas noszenia tamponu należy dostosować do okresu: w cięższe dni zaleca się zmianę po 3-5 godzinach, w słabsze dni około 5-8 godzin. Maksymalny czas pozostawienia tamponu w pochwie wynosi 8 godzin.

Tampon należy wymienić natychmiast po odbyciu stosunku płciowego bez prezerwatywy.

**Instrukcja wyjmowania:**

1. Umyć ręce.
2. Przyjąć optymalną pozycję do usuwania tamponu, najlepiej przykucnąć z szeroko rozstawionymi nogami (w pozycji kucznej długość pochwy ulega zmniejszeniu).
3. Chwycić tampon jednym palcem za uchwyt w kształcie klapki i go wyciągnąć.

W sytuacji gdy tamponu nie uda się usunąć można zostawić go nieco dłużej i poczekać aż się prawidłowo wchłonie (łatwiej usuwa się w pełni wchłoniętą gąbkę). Pomocna może być relaksująca kąpiel lub przysiad i mocne pchanie (tak jak przy wypróżnieniu) co może pomóc w stopniowym zsunięciu gąbki w dół pochwy do momentu gdy uda się ją chwycić i wyciągnąć. Jeśli to nie pomoże należy udać się do ginekologa.

Tampony Soft-Tampons to produkt jednorazowego użytku, wielokrotne stosowanie może prowadzić do infekcji. Należy pamiętać o usunięciu ostatniego tamponu pod koniec menstruacji. Gąbka menstruacyjna nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

**Szerokość w najszerszym miejscu:** 4,5 cm

**Długość:** 5,2 cm

**Wysokość:** 2 cm

**Opakowanie:** 3 sztuki