

JOYDIVISION Tampony bezsznureczkowe Soft-Tampons mini - 50szt.

Cena: 144,90 pln



Opis słownikowy

Opakowanie	50 szt.
Producent	JoyDivision

Opis produktu

Bezsznureczkowe miękkie tampony Soft-Tamons sprawdzające się podczas miesiączki, idealnie sprawdzają się podczas aktywności takich jak pływanie, uprawiania sportu, korzystania z sauny czy seks.

Produkt wykonany został z różowego, miękkiego medycznego materiału gąbkowego (poliuretan) który nie zawiera substancji chemicznych. Pianka posiada certyfikat OEKO-TEX i oznaczenie STANDARD 100, co zapewnia o przebadaniu pod kątem obecności szkodliwych substancji.

Zaletą tamponów Soft-Tampons jest możliwość używania ich podczas pływania, tak samo jak w przypadku tamponów tradycyjnych. Mogą one ponadto ograniczyć przenikanie do pochwy chlorowanej lub potencjalnie zanieczyszczonej wody.

Kształt przypominający serce, który wpływa na zwężenie końcówki gąbki, natomiast dwa rozsunięte skrzydła tworzą pustą przestrzeń na spodzie, w której umieszcza się palec podczas aplikacji.



Właściwości:

- elastyczny materiał dopasowuje się do kobiecej anatomii

- nie podrażniający ciała, higieniczny materiał
- ergonomiczny kształt
- dyskretne i wygodne
- bezpieczne w użytkowaniu
- łatwe w aplikacji i usuwaniu
- nie zawiera lateksu
- każdy tampon pakowany pojedynczo
- testowane dermatologicznie i klinicznie

Instrukcja aplikacji:

1. Umyć ręce.
2. Wyjąć tampon z opakowania.
3. W celu ułatwienia włożenia, nałożyć na suchy tampon odrobinę żelu nawilżającego lub czystej zwilżyć go czystą wodą. Przed włożeniem należy z tamponu wycisnąć wodę aby utrzymał maksymalną chłonność.
4. Przyjąć optymalną pozycję: usiąść na sedesie lub przykucnąć.
5. Tampon chwycić z boku dwoma palcami (kciukiem i palcem środkowym) i ścisnąć go, ściśnięcie spowoduje utworzenie na spodzie gąbki wgłębienia na palec, które ułatwi wprowadzenie tamponu aż do szyjki macicy.

Zaleca się wymianę tamponu co 4-6 godzin jednak czas noszenia tamponu należy dostosować do okresu: w cięższe dni zaleca się zmianę po 3-5 godzinach, w słabsze dni około 5-8 godzin. Maksymalny czas pozostawienia tamponu w pochwie wynosi 8 godzin.

Tampon należy wymienić natychmiast po odbyciu stosunku płciowego bez przerwy.

Instrukcja wyjmowania:

1. Umyć ręce.
2. Przyjąć optymalną pozycję do usuwania tamponu, najlepiej przykucnąć (w pozycji kucznej długość pochwy ulega zmniejszeniu).
3. Chwycić tampon jednym palcem za uchwyt w kształcie klapki i go wyciągnąć.

W sytuacji kiedy tamponu nie uda się usunąć można zostawić go nieco dłużej i poczekać aż się prawidłowo wchłonie (łatwiej usuwa się w pełni wchłoniętą gąbkę). Pomocna może być relaksująca kąpiel lub przysiad i mocne pchanie (tak jak przy wypróżnieniu) co może pomóc w stopniowym zsunięciu gąbki w dół pochwy do momentu gdy uda się ją chwycić i wyciągnąć. Jeśli to nie pomoże należy udać się do ginekologa.

Tampony Soft-Tampons znane są również jako:

- Sport-Tampons - brak sznureczka nie przeszkadza podczas uprawiania sportu i nie powoduje nieprzyjemnych otarć
- Tampon pływacki - miękki tampon nie pęcznieje, jest dyskretny i niezauważalny.
- Sauna&Spa-Tampon - gąbka bez sznureczka zapewnia najwyższą dyskrecję, tampon optymalny do stosowania w saunie i w salonach SPA.
- Sex-Tampon - miękki materiał nie jest wyczuwalny przez partnera i zapobiega wyciekom krwi menstruacyjnej.

Tampony Soft-Tampons są wyrobem jednorazowego użytku, wielokrotne stosowanie może prowadzić do infekcji.

Pod koniec menstruacji należy pamiętać o usunięciu ostatniego tamponu.

Tampon nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Szerokość w najszerszym miejscu: 4,5 cm

Długość: 5,2 cm

Wysokość: 2 cm

Opakowanie: 50 sztuk

Producent:

JOYDIVISION international AG

Wiesenaer Strasse 11

Hannover 30179

Niemcy



kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.

dlpacjenta.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlpacjenta.pl

email@joydivision.de