

Kompres błyskawiczny PRIME ONE suchy lód 18 x 13,5cm

Cena: 4,55 pln



Opis słownikowy

Producent	AKZENTA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Okład samochłodzący PRIME ONE do stosowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Kompres błyskawiczny pomaga zredukować i zmniejszyć ból i opuchliznę, przynosi ulgę w warunkach wymagających zimnej terapii.

Produkt jest odpowiedni do stosowania przy:

- gorączce
- bólach głowy
- siniakach
- napięciu mięśni
- stłuczeniach
- niewielkich oparzeniach

Przechowywać w apteczce i zabierać ze sobą na wyjazdy, pikniki, kempingi i inne aktywności wykonywane na zewnątrz.

Sposób użycia:

1. Nacisnąć worek obiema rękami w celu uwolnienia wewnętrznego pęcherzyka wody i zainicjowania reakcji między pęcherzykiem wody a związkami soli azotowej.
2. Potrząsnąć okładem w celu osiągnięcia maksymalnego schłodzenia, zmieszania zawartości torebki i wywołania reakcji endotermicznej, obniżającej temperaturę do -4°C .
3. Przyłożyć kompres do miejsca urazu. Aby zapobiec odmrożeniom kontakt z kompresem należy ograniczyć do 15 minut.

Worek zewnętrzny wykonany jest z materiału włókninowego, co zapewnia wysoką odporność, przechowywanie w chłodni i nieprzepuszczalność. Włókna chroni nadwrażliwe strefy nadmiernego odczucia chłodu.

Produkt chroniony patentem.

Jest to produkt jednorazowego użytku.

Nie należy go otwierać ani stawiać na nim ostrych i ciężkich przedmiotów.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie zamrażać.

Skład: mocznik, chlorek amonu, woda.

Rozmiar: 18 x 13,5 cm

Nazwa producenta
Akzenta International SA
Via Giuseppe Motta, 24
CH-6830 Chiasso
business@akzenta.com

Osoba odpowiedzialna w UE:
Dental Color Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3c lok. 16
91-342 Łódź
biuro@dentalcolor.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar