

Kompres żelowy ciepło-zimno wielokrotnego użytku Sports Edition Hot/Cold ACTIMOVE 72075-00022

Cena: 47,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Actimove
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Kompres żelowy Actimove Sports Edition to praktyczne rozwiązanie wspomagające leczenie urazów oraz dolegliwości mięśniowo-stawowych.

Dzięki możliwości stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem, kompres może być wykorzystywany w wielu sytuacjach – od świeżych kontuzji po przewlekłe napięcia mięśni. Elastyczna konstrukcja umożliwia dopasowanie kompresu do różnych partii ciała, takich jak kolano, bark, plecy czy kostka. Produkt może być **stosowany wielokrotnie**, co czyni go wygodnym elementem domowej apteczki oraz wyposażenia sportowego.

Właściwości:

- Łatwy do schłodzenia w zamrażarce lub lodówce.
- Szybko nagrzewa się w mikrofalówce lub w ciepłej, niewrzącej wodzie.
- Utrzymuje niską lub wysoką temperaturę przez zalecany czas terapii wynoszący 20–30 minut.
- Dzięki starannie dobranemu żelowi dobrze dopasowuje się do kończyn i stawów podczas terapii chłodzącej.

- Wygodny, ponieważ kompres jest miękki i nie ma ostrych krawędzi
- W celu ochrony skóry podczas użytkowania produkt jest dostarczany w pokrowcu z polaru.
- W celu ułatwienia higieny kompres można czyścić ściereczką i dezynfekować nawilżaną chusteczką

Przygotowanie przed terapią rozgrzewającą / termoterapią

Użycie gorącej wody:

- Podgrzać wystarczającą ilość wody, aby całkowicie zakryć opakowanie żelowe.
- Kiedy woda osiągnie temperaturę około 80°C, należy wyłączyć kuchenkę lub czajnik i ostrożnie umieścić opakowanie z żelem w gorącej wodzie na 1–2 minuty.

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej:

- Podgrzewać przez cztery minuty przy mocy 180 W

Przygotowanie przed krioterapią / terapią zimnem

- Kompres żelowy należy przechowywać w pozycji poziomej w zamrażarce (od -10°C/50°F do -15°C/5°F) lub w lodówce (10°C/50°F). Gotowy do pierwszego użycia po dwóch godzinach w zamrażarce lub sześciu godzinach w lodówce
- Nałożyć na obszar, który ma być poddany terapii
- Między żelowym wkładem a skórą należy zawsze umieścić ściereczkę, ręcznik lub dołączony pokrowiec.

Stosowanie zimna i ciepła należy ograniczyć do 20–30 minut

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do zewnętrznego stosowania na ciepło lub zimno na ciele a także na:

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów

Rozmiar: 11x29cm

Producent:

BSN medical GmbH

Schützenstraße 1-3


22761 Hamburg

actimove.polska@essity.com

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Galeria

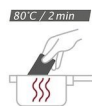

80°C / 2 min



180W / 4 min.



-15°C: 2h

10°C: 6h