

Masażer wibrujący jajko Inty Toys NEO z pilotem USB

Cena: 149,90 pln

Opis słownikowy

Producent INTY Toys



Opis produktu

Wibrujące jajko do ćwiczenia mięśni Kegla Inty Toys NEO z pilotem wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku silikonu, który zapewnia jedwabiące gładki dotyk.

Produkt, dzięki temu, że ćwiczy mięśnie Kegla (stymuluje dolne mięśnie miednicy), jest pomocny przy nietrzymaniu moczu, oraz ułatwia poród i przyspiesza dojście do formy po urodzeniu dziecka. Mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy, są współodpowiedzialne za podtrzymywanie macicy i kontrolę pęcherza. Dzięki ćwiczeniom kulkami gejszy mięśnie te są utrzymane w dobrej kondycji, co jest bardzo istotne, ponieważ wraz z wiekiem stają się one coraz słabsze.

Jajko wibrujące NEO to urządzenie z możliwością ładowania USB, z 10 różnymi trybami wibracji i bezprzewodowym pilotem, który umożliwia ich samodzielne kontrolowanie i dobór odpowiedniego ustawienia spośród dostępnych. Pilot pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem i daje użytkownikom swobodę i większe możliwości dopasowania działania do indywidualnych potrzeb.

Produkt posiada elastyczny pasek, ułatwiający wyjęcie kulki po zakończonym treningu. Dzięki 10 trybom wibracji i mocnemu, cichemu silnikowi, ćwiczenie może stać się przyjemniejsze i za każdym razem być inaczej odczuwane.

Właściwości:

- Przyjazne dla skóry
- Wibrujące
- Stymulujące
- Wodoodporne IPX-7

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem, umyć jajko ciepłą wodą z mydłem. Aby zapobiec uszkodzeniom zadbać żeby woda nie dostała się do komory baterii. Naładować kulki i pilota.

Zaaplikować na produkt odpowiedni lubrykant (wyłącznie na bazie wody).

Przyjąć komfortową pozycję, leżącą lub w przysiadzie i umieścić produkt w waginie.
Jeśli kulki są umieszczone prawidłowo można włączyć urządzenie i sterując pilotem dobrać odpowiednie ustawienie wibracji. Jeśli przy włożonych kulkach odczuwa się dyskomfort należy je wyjąć i spróbować umieścić je ponownie.
Umyć jajko po każdym użyciu używając ciepłej wody z mydłem.

Aby trening był efektywny powinno się go przeprowadzać 1-2 razy dziennie przez około 15 minut. W czasie ćwiczenia można wykonywać codzienne normalne czynności. Najlepszy efekt przynosi podczas poruszania się, stania lub chodzenia.

Aby uniknąć przeciążeń i tym samym zakwasów mięśni dna miednicy, pamiętajmy, aby już na początku nie przesadzić z treningiem.

Środki ostrożności:

Przechowywać z dala od dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

Nie stosować w przypadku uszkodzonej lub podrażnionej skóry.

Produkt przeznaczony do użytku przez jedną osobę. W celu uniknięcia infekcji lub chorób nie należy korzystać z kulek innymi osobami.

W przypadku odczuwania dyskomfortu lub nieprzyjemnego podrażnienia zaprzestać stosowania produktu.

Nie zamrażać ani nie podgrzewać urządzenia.

Stosować produkt wyłącznie gdy jest się w dobrym stanie fizycznym.

Kolor: czarny

Materiał: Silikon ciekły

Długość: 17,5cm

Średnica: 3,8cm

Czas ładowania: 80 minut

Czas pracy na jednym ładowaniu: 50 minut

Zasięg pilota: 10 metrów

Zawartość zestawu: jajko wibrujące, pilot, kabel USB do ładowania.

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

INTY Toys

Handelsweg 1-A

1851 NX Heiloo

Holandia

info@intytoys.com