

# Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych

Cena: 6,20 pln

## Opis słownikowy

Producent	Nieokreślony
Rejestracja	Wyrób medyczny



## Opis produktu

Maseczka tlenowa z nebulizatorem i drenem.

### Przeznaczenie:

maseczka przeznaczona jest do terapii inhalatorowej.

W skład zestawu wchodzi jedna maseczka + nebulizator + dren.

**Rozmiar:** dla dorosłych L

**Długość drenu:** 2,10m

**Instrukcja użytkowania:**

1. Odkręcić nakrętkę nebulizatora i włączyć do niego przepisany przez lekarza środek, po czym złożyć nebulizator.
2. Otwór wylotowy nebulizatora połączyć z maską.
3. Jeden koniec drenu podłączyć do nebulizatora, a drugi do źródła sprężonego powietrza lub tlenu.
4. Maskę przyłożyć do twarzy i postępować według zaleceń lekarza.