

Mata do akupresury z poduszką klasyczna 68x42cm

Cena: 105,30 pln



Opis słownikowy

Producent	4FIZJO
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Mata dostępna w różnych kolorach. Kolor do wysyłki wybierany jest losowo spośród dostępnych w magazynie. W przypadku chęci ustalenia dostępnego koloru maty, przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Mata do akupresury 4FIZJO jest wyrobem medycznym o właściwościach antyalergicznym (wszystkie użyte elementy są antyalergiczne), który łagodzi ból, uczucie zmęczenia i prowadzi do relaksacji ciała. Maty zarejestrowano w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co daje użytkownikowi pewność, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne.

Kolce, które posiada mata, poprzez ucisk wybranych rejonów ciała, wpływają na poprawę ukrwienia mięśni doprowadzając do ich szybszej regeneracji oraz do wydzielania się poprawiających nastrój endorfin, które wpływają na działanie neuropeptydów - cząsteczek których zadaniem jest uśmierzenie bólu. Kolce i tworzywa, z których wykonane są maty do akupresury zostały przetestowane i mogą być używane bezpośrednio na gołą skórę.

Klasyczna mata do akupresury 4FIZJO, posiada 7476 kolców, na poduszce znajduje się ich 2142. Na każdej rozetce są 42 kolce, jest to dwukrotnie większa ilość niż w standardowych matach.

Wykonany z wysokiej jakości czystej bawełny pokrowiec posiada rozetki z kolcami i jest w pełni zdejmowalny, co pozwala zadbać o czystość i higienę maty, dzięki taśmie wentylującej jest on dodatkowo przewiewny, dzięki czemu mata pozostaje świeża i nie zatęchnie. Posiada on wygodny uchwyt. Materiały użyte do produkcji mat to najwyższej jakości surowce zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

Zastosowanie przy dolegliwościach:

- stres, bezsenność, depresja
- bóle: szyi, pleców, kręgosłupa, barków, głowy
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- rwa kulszowa

- neuralgie
- napięcie mięśniowe
- słabe krążenie

Sposób używania:

Zaleca się korzystanie z maty codziennie. Czas używania uzależniony jest od poziomu zaawansowania użytkownika:

- Początkujący 5 - 10 minut
- Średniozaawansowany 10 - 20 minut
- Zaawansowany 20 - 40 minut

Czas można systematycznie zmieniać po przystosowywaniu się do niej. Początkowo użytkownik może odczuwać dyskomfort, jednak po pewnym czasie stasowania zauważalne powinno być zwiększenie krążenia krwi.

Używanie maty najlepiej rozpocząć od położenia się na niej bez ubrania lub np. w cienkiej koszulce.

Wyrobu można używać również poprzez stanie na nim lub siedzenie.

Przeciwwskazania do stosowania:

Maty nie powinno się stosować w przypadku cierpienia na zaburzenie krzepliwości (hemofilia), stosowania leków przeciwzakrzepowych (np. Clexane, Heparin) lub jeśli ma się wrażliwą skórę, uskarża się na dolegliwości skórne, po których użycie maty mogłoby przynieść negatywne skutki.

Korzyści płynące z użytkowania maty:

- zmniejszenie bólu pleców, bioder, głowy, uczucia zmęczenia
- zwiększenie krążenia krwi i energii witalnej
- rozluźnienie mięśni
- zapewnienie poczucia głębokiego relaksu
- poprawa jakości snu

Charakterystyka maty:

Długość: 68 cm
Szerokość: 42 cm
Grubość: 2 cm
Materiał: naturalna bawełna
Wymiary poduszki: 39x14x10 cm

Charakterystyka rozet:

Ilość rozet z kolcami: 178
Ilość kolców na rozetce: 42
Ilość rozet na poduszce: 51
Materiał: kolce - ABS

Pielęgnacja i przechowywanie:

- Matę należy przechowywać w dopasowanej torbie przewoźnej, przy zwijaniu kolce były powinny być skierowane na zewnątrz, aby uniknąć ich zużycia.
- Myć ręcznie letnią wodą z mydłem. Dokładnie wyptukać i wysuszyć.
- Unikać używania pralki lub suszarki, ponieważ mogą uszkodzić grzbiety.