

# Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny bąbelkowy z kompresorem (do 135 kg) Timago TGR-Y MB 001-1

Cena: 149,00 pln



## Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | Timago         |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

## Opis produktu

Wykonany z wytrzymałego PCV zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy o strukturze bąbelkowej.

Materac wyposażony jest w kompresor, który poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej wpływa na zmniejszenie ucisku na najbardziej narażone na powstawanie odleżyn części ciała i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Wyrób wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz leczeniu odleżyn do I stopnia (wg NPUAP/EPUAP).

### Sposób użycia:

1. Materac umieścić na łóżku, kładąc go bezpośrednio na materac sypialny. Wyłogi znajdujące się na końcach materaca przeciwodleżynowego zawinąć pod materac sypialny, ograniczyć to możliwość ewentualnego przesuwania się ich względem siebie. W celu zachowania higieny zaleca się przykryć materac podkładem higienicznym lub bawełnianym prześcieradłem, tak aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem.
2. Wieszak kompresora otworzyć na odpowiednią szerokość i powiesić go na ramie łóżka.
3. Kompresor i materac połączyć przewodami powietrznymi tak, aby nie były one załamane i nie znajdowały się pod materacem. Należy się upewnić, czy przewody są prawidłowo umocowane i nie wysuwają się z portów.
4. Przy użyciu przewodu zasilającego podłączyć kompresor do sieci elektrycznej. Zachować przy tym należy szczególną ostrożność.
5. Aby uruchomić kompresor, wcisnąć przycisk ON na panelu sterującym. Nastąpi pompowanie materaca przeciwodleżynowego.
6. Pokrętkę regulacji ciśnienia ustawić na wartość maksymalną. Czas rozruchu (pierwszego pompowania) przed korzystaniem z zestawu wynosi 24 minuty (2 pełne cykle).
7. Po całkowitym napompowaniu materaca ustawić pokrętkę ciśnienia na wartości odpowiadającej wadze pacjenta. Po tej czynności wyrób jest gotowy do użytku.

Nie należy korzystać z materaca przed jego całkowitym napompowaniem.

Z materaca można korzystać dopiero po upływie 24 minut od uruchomienia.

Cięśnienie powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, które wynikają z dolegliwości towarzyszących chorobie i ogólnego stanu pacjenta oraz skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

**Dane techniczne:**

Czas cyklu: 12 minut

Głośność pompy: 36.9 dB

Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg

Przepływ: 4-6 l/min

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Wymiary materaca: 200 x 90 x 7 cm

Waga materaca: 2 kg

Waga pompy: 1,5 kg

Zasilanie: AC 220V- 50/60 Hz 0,1 A

Pobór mocy: 9 W

Kolor: beżowy

**Zawartość zestawu:**

- materac komorowy
- pompa zmiennociśnieniowa Soft Wind III
- zestaw naprawczy (łata + klej)
- przewody powietrzne

**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar