

Microdacyn 60 Wound Care roztwór odkażający na rany - 250ml



Cena: 52,99 pln

Opis słownikowy

Pojemność	250ml
Producent	Kikgel
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Microdacyn to wodny roztwór oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Wyrób ten służy do odkażania ran ostrych i przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej co czyni go idealnym produktem do apteczki.

Microdacyn **niszczy 99,99% bakterii** już po 30s od aplikacji na ranę jednocześnie będąc jednym z **najbardziej bezpiecznych produktów** inicjujących procesy gojenia

Microdacyn jest roztworem **ponadtlenków**, który łączy wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową z bezpieczeństwem stosowania – brak działania cytotoksycznego dla zdrowych tkanek.

Służy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych, takich jak:

- Owrzodzenia
- Odleżyny
- Rany w przebiegu stopy cukrzycowej
- Rany oparzeniowe
- Rany pooperacyjne
- Owrzodzenia nowotworowe

Microdacyn posiada następujące właściwości:

- Szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby).
- Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny.
- Jest bezpieczny dla zdrowych komórek – nie są znane jego skutki uboczne.

- Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich.
- Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna.
- Nie powoduje uodpornienia bakterii.
- Niweluje nieprzyjemny zapach ran.
- Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.
- Obojętny odczyn pH.

Autosterylność oraz aktywność przeciwdrobnoustrojowa została potwierdzona badaniami wykonanymi w Narodowym Instytucie Leków.

Mikrodacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia

Nie są znane żadne działania uboczne Microdacyn na ludzkie komórki

Nie wymaga wypłukiwania i jest bezpieczny dla gałki ocznej czy jamy ustnej co świadczy o jego pełnej biozgodności.

Sposób Użycia:

1. Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn i położyć bezpośrednio na ranę.
 2. Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku.
- Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.
 - Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie.
 - Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu.
 - Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany.

Pojemność: 250ml

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar