

# Opatrunek foliowy Suprasorb F chroni ranę i przymocowuje opatrunek 10cm x 10m



Cena: 125,00 pln

## Opis słownikowy

Producent	Lohmann-Rauscher
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Zastosowanie:

- rany o lekkim wysięku
- rany powierzchowne
- rany bez zakażenia
- Rany w fazie epitelizacji, np. owrzodzenia różnego pochodzenia, oparzenia II stopnia, miejsca ubytku skóry w wyniku pobrania, rany pooperacyjne, otarcia.
- Można stosować jako opatrunek wtórny w przypadku ran zagrożonych zakażeniem w ramach regularnej terapii przeciwbakteryjnej.

**Rozmiar:** 10cm x 10m (niesterylne)

### Właściwości:

- łatwa aplikacja
- wysoki komfort noszenia dzięki pewnemu i elastycznemu mocowaniu
- bardzo dobra kontrola rany
- skuteczna ochrona przed wpływem czynników zewnętrznych, np. zarazków
- bardzo dobre gojenie rany dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza
- możliwa kąpiel pod prysznicem w opatrunku
- ścieralny, również za pomocą środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, jod lub oktenidynę.

Suprasorb F zapewnia przezroczystą ochronę. Elastyczna folia poliuretanowa przepuszcza powietrze i dzięki wymianie gazów i ciepła umożliwia utworzenie wilgotnego środowiska rany, sprzyjającego jej gojeniu. Suprasorb F nie przepuszcza płynów i chroni ranę lub miejsce wklucia przed kolonizacją bakterii wnikaających z zewnątrz.

Przezroczysta struktura opatrunku ułatwia kontrolę rany i miejsca wklucia. Suprasorb F jest elastycznym i rozciągliwym opatrunkiem, bardzo łatwym w użyciu. Suprasorb F jest produktem ścieralnym, również za pomocą środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, jod lub oktenidynę. Opatrunek zapewnia dobrą ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych, nie przeszkadza podczas kąpieli w

wannie lub pod prysznicem. Suprasorb F jest dostępny w formie jałowego opatrunku foliowego na rany lub niejadalnego opatrunku foliowego na rolce.

**Częstość zmian opatrunku:** Lekarz prowadzący leczenie powinien dokonywać zmiany opatrunku w zależności od stanu rany, stopnia wysięku i obecności opatrunku wtórnego, najpóźniej po 5-7 dniach.

#### Zalecane połączenia produktów

- Suprasorb Liquacel
- Suprasorb X
- Suprasorb X + PHMB
- Suprasorb C
- Kompres Suprasorb G
- Leczenie uciskiem