

# ORLIMAN One Plus Szyna (stabilizator) nadgarstka ze sztywnikiem dłoniowym (duże rozmiary) OPL350 - lewa



Cena od: 129,00 pln

## Opis słownikowy

Producent	Orliman
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Orteza (szyna) nadgarstka wykonana z półprzepuszczalnego i półsztywnego antybakteryjnego materiału zaprojektowana aby dopasować się do budowy anatomicznej ręki pacjenta i różnic w obwodach przedramienia i nadgarstka.

Wyposażona została w dodatkowe szyny stabilizujące, jest wyprofilowana i wykonana z aluminium, specjalnie ukształtowana aby zapewnić sztywność i wytrzymałość podczas użytkowania. Jest również wzmocniona sztywnikami grzbietowymi.

stabilizator posiada wewnętrzne wkładki ochronne, natomiast zewnętrzna warstwa materiału jest wysoce wytrzymała na działanie czynników mechanicznych, wewnątrz znajduje się pianka z pamięcią kształtu, która redukuje naciski i zapobiega powstawaniu bólu w strefach zwiększonego nacisku.

Komfort użytkowania zwiększa delikatny materiał wewnętrzny, pozwalający na długotrwałe stosowanie ortozy bez obawy o powstawanie otarć i dodatkowych dolegliwości bólowych

Dodatkową zaletą ortozy jest zawartość ThermoTex rozwiązania antybakteryjnego i przeciwpachowego, a na łączeniu tutora elastyczny materiał łączący, umożliwiający łatwe zakładanie.

### Zalecenia:

- zespół cieśni nadgarstka
- leczenie pooperacyjne i pourazowe
- skręcenia
- stany zapalne więzadeł i ścięgien
- osteoartrozy (włączając rizarthrozę) i stany zapalne stawów

**Dopasowanie:**

1. Rozluźnić taśmy umieszczone się w części grzbietowej stabilizatora, odpinając zapięcia micro-velcro.
2. Nadać aluminiowej szynie kształt zapewniający uzyskanie odpowiedniego kąta zgięcia dłoniowego/grzbietowego.
3. Wsunąć dłoń do ortozy, kciuk umieszczając w przeznaczonym na niego otworze. Upewnić się, że orteza pozostaje odpowiednio wycentrowana w stosunku do osi nadgarstka i przedramienia (po stronie dłoniowej).
4. Dociągnąć i zapiąć taśmy tak, aby zapewnić mocne i wygodne zapięcie.

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 3

Rozmiar	Obwód nadgarstka (cm)	Długość (cm)
1	19-21	21
2	21-23	
3	23-25	

Rozmiar stabilizatora powinien być dobrany przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną, według tabeli rozmiarowej. Zbyt duży ucisk może powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania uczucia optymalnego przylegania szyny do ciała.

**Kolor:** czarny (OPL350)

**Wersja:** lewa