

Pajęczek wibrujący - sygnalizator wadliwej postawy (na proste plecy)



Cena: 58,00 pln

Opis słownikowy

Producent	MED PATENT
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pajęczek wibrujący na proste plecy (korektor postawy). Pajęczek wyrabia nawyk prawidłowej postawy podczas stania, chodzenia i siedzenia, poprzez czynne wzmocnienie mięśni. Dzięki temu osoba, która go nosi, przestaje się garbić. Pajęczka warto stosować profilaktycznie, żeby nie wystąpiły trwałe zmiany związane z garbieniem się.

Rozmiar: Pajęczek posiada płynną regulację rozmiaru. Rozmiar uniwersalny.

Kolor: indygo

Właściwości:

- koryguje garbienie się dzieci młodzieży i osób dorosłych

- zapobiega deformacjom klatki piersiowej

- wyrabia nawyk prawidłowej postawy

Przeznaczenie:

Pajęczek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadą postawy w postaci zaokrąglonych pleców, odstających łopatek oraz płaskiej klatki piersiowej.

Zaleca się noszenie pajęczka szczególnie dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu i kształtowania się postawy ciała. Poleca się go również osobom dorosłym posiadającym zaokrąglone plecy i złą postawę.

"Pajęczka" zakładamy na plecy w taki sposób aby szelki były lekko napięte a przy garbieniu wyzwał się sygnał dźwiękowy. Dla lepszego efektu korekcji wskazanym jest wydłużanie czasu noszenia "Pajęczka" lub skręcanie długości szelek.

Zaleca się noszenie sygnalizatora postawy dwa, trzy razy dziennie po. ok. 10-15min. - podczas oglądania TV, pracy na komputerze lub odrabiania lekcji

PAMIĘTAJ:

Wyrobiony nawyk prostych pleców - szczególnie w pozycji siedzącej, to ochrona przed bólami kręgosłupa.

Wyrób medyczny

Pajęczek został stworzony przez specjalistę rehabilitacji leczniczej i otrzymał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Pajęczek został zarejestrowany jako wyrób medyczny, co świadczy o jego skuteczności w działaniach prozdrowotnych.