

Pas asekuracyjny do wózków inwalidzkich - zabudowany

Cena: 89,00 pln



Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl

Opis produktu

Pas asekuracyjny zabudowany z szelkami do dodatkowej stabilizacji osoby na wózku inwalidzkim.

Właściwości

- Pomocny w opiece nad osobami ruchliwymi, nie utrzymującymi równowagi, bezwładnymi.
- Służy do zabezpieczania i asekuracji osób na wózku inwalidzkim, krześle, fotelu, łóżku itp.
- Ułatwia prowadzenie wózka inwalidzkiego z niestabilnym użytkownikiem.
- Łatwy i wygodny w użyciu. Nie wrzyna się w brzuch.

Sposób użycia:

Siedzącą (leżącą) osobę opleść pasem wraz z oparciem (podgłówkiem), zapiąć klamrę i dopasować długość taśmy do obwodu użytkownika, pozostawiając lekki luz.

Szelki z taśmą przełożyć przez głowę zapinanej osoby, tak aby znalazła się za jej plecami. Drugi odcinek przeciągnąć dołem pod siedzeniem wózka w okolicy krocza pacjenta i zapiąć, łącząc z górnym odcinkiem taśmy i dopasowując długość pozostawiać lekki luz.

Skład: poliester i bawełna, taśma pleciona, klamra plastikowa, wypełnienie

Prać ręcznie w temp. do 40°C.

Wymiary:

- długość bez taśm: 70cm; szerokość 20cm
- długość z taśmami 175cm

Termin ważności: nie określa się

Niniejszy produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

Kolor pasa wysyłamy losowo spośród dostępnych w magazynie. W sprawie informacji o dostępnych kolorach prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Producent:

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PRO-DENT Jacek Kuźniar

Handzlówka 5a

37-123 Handzlówka

biuro@dlapacjenta.pl