

Pink Test - Test ciążowy płytkowy do użytku domowego



Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Hydrex Diagnostics
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

PINK Test jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 3 minut.

Test ciążowy PINK Test należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15 – 30°C). Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności.

Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone.
Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

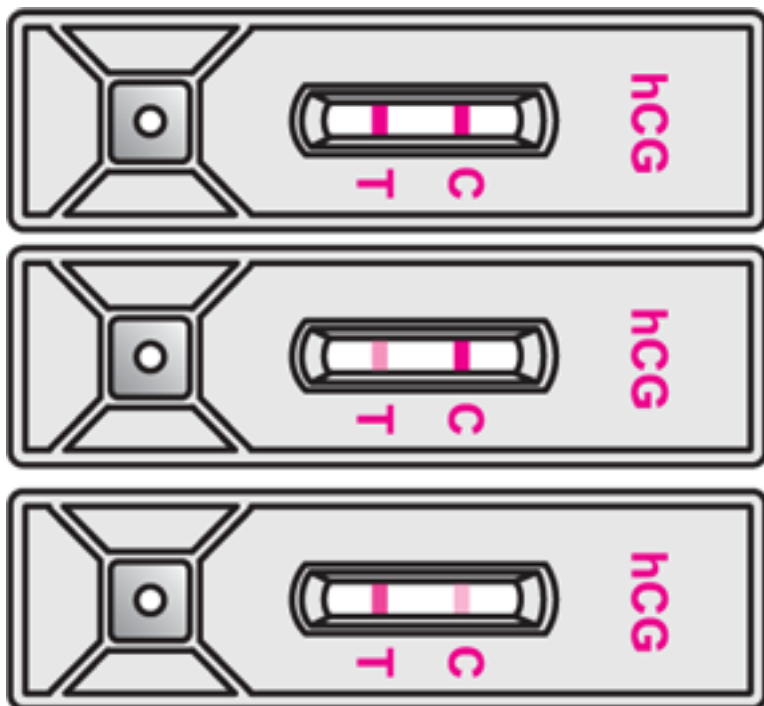
Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjąć płytkę testową i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
 - Płytkę testową umieścić na poziomej powierzchni.
 - Końcówkę plastikowej pipetki zanurzyć w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napęlnić ją moczem.
 - Odmierzyć powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka S na płytce testowej. Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę należy trzymać pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
 - Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
 - Wynik testu odczytać po 3 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka S na płytce testowej.
 - Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.
- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

Jak interpretować wynik testu:

Wynik dodatni (ciąża)

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.

**Wynik ujemny (brak ciąży)**

Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.

**Wynik niejednoznaczny**

W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu płytkowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

