

Pompowana poduszka do obracania pacjenta Timago Bubble Roll

Cena: 75,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Timago
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pompowana poduszka do obracania pacjenta o wyprofilowanym kształcie z wycięciami na umieszczenie nóg pacjenta.

Wyrób ułatwia opiekę nad osobami długotrwale lub stale leżącymi w łóżku, w tym nad osobami starszymi, sparaliżowanymi lub niepełnosprawnymi. Dodatkowo jest pomocna podczas zastosowania znieczulenia ogólnego, występowania dysfunkcji poznawczych i fizycznych.

Dzięki ergonomicznemu kształtowi poduszki i możliwości regulacji twardości przez dopompowania lub upuszczenia powietrza jest lekka, a jej użycie nie wymaga dużego nakładu siły oraz jest komfortowe zarówno dla pacjenta, jak i jego opiekuna.

Produkt jest odpowiedni do stosowania w sytuacji gdy osobę leżącą trzeba odwrócić w celu przebrania lub wykonania czynności pielęgnacyjnych.

Poduszka dedykowana jest zwłaszcza dla opiekunów osób długotrwale leżących, fizjoterapeutów, masażyści, pielęgniarek i lekarzy. Jest odpowiednia do stosowania zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i w warunkach domowych.

Czyszczenie poduszki:

Powierzchnię poduszki można czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnych środków czyszczących, nie dopuszczając do jej zamoczenia.

Nie używać środków ściernych, wybielaczy, płynów do zmiękczenia tkanin oraz środków do czyszczenia na sucho.

W procesie suszenia poduszki nie należy używać źródeł ciepła.

Czyszczenie pokrowca:

Pokrowiec można prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C używając łagodnych detergentów.

Można suszyć w suszarce o niskiej temperaturze lub strumieniem ciepłego powietrza.

Pokrowiec założyć na poduszkę tylko po całkowitym wysuszeniu. Pokrowca nie należy prasować.

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

Sposób użycia:

Poduszkę napompować przy użyciu pompki dołączonej do zestawu.

Wsunąć poduszkę pod kolana leżącego pacjenta w taki sposób aby oba wgłębienia znalazły się pod jego kolanami.

Podnieść poduszkę do pozycji pionowej i jedną ręką podtrzymując pacjenta, a drugą uchwyt poduszki, obrócić pacjenta w pożądanym kierunku.

Po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych, odwrócić pacjenta z powrotem na plecy i wyciągnąć poduszkę.

Nie stosować na gołe ciało. Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą

Wymiary: 55 cm x 41 cm x 16 cm

Pokrowiec: antypoślizgowy na zamek błyskawiczny

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Galeria

