


Pompowana poduszka przeciwoleżynowa pod plecy Timago RestTIM

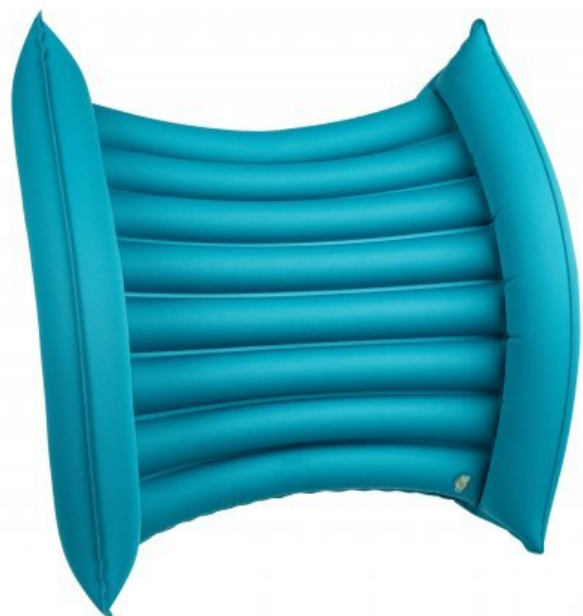

Cena: 125,00 pln

Opis słownikowy

Producent	Timago
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pompowana poduszka przeciwoleżynowa wykonana z wysokiej jakości materiału TPU o wielokomorowej konstrukcji.

Wyrób posiada 10 komór, które połączone są w jeden system powietrzny zapewniający odpowiedni balans ciała. Nacisk wywierany na jedną z komór poduszki powoduje wzrost ciśnienia powietrza w sąsiednich komorach a tym samym odciążenie nacisku na odcinek lędźwiowy kręgosłupa co sprzyja zmniejszeniu ryzyka powstawania odleżyn.

Na komfort użytkowania poduszki wpływa możliwość zmiany jej twardości poprzez dopompowanie lub spuszczenie powietrza oraz ukryty zawór powietrza.

Produkt przeznaczony do stosowania w profilaktyce przeciwoleżynowej do I stopnia odleżyn (wg NPUAP / EPUAP) u osób narażonych na powstawanie odleżyn, długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym.

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

Sposób użycia:

Rozłożyć poduszkę na płaskiej powierzchni.
Otworzyć zawór powietrza i włożyć pompkę.
Napompować do wymaganej twardości.

Uwagi i zalecenia:

Poduszkę pompować tylko dołączoną pompką, uważając by nie uszkodzić zaworu powietrza. Nie pompować kompresorem. Nadmierne ciśnienie może doprowadzić do rozerwania poduszki.

Nie stawiać na poduszce. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia.
Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ognia i ostrych przedmiotów.
Nie narażać na działanie wysokich temperatur i promieni słonecznych, wzrost temperatury w środku poduszki może skutkować jej rozerwaniem. Nie narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

Czyszczenie i konserwacja:

Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących, nie dopuszczając do jej zamoczenia. Nie stosować wybielaczy, płynów do zmiękczenia tkanin oraz środków do czyszczenia na sucho. Nie używać środków ściernych. Przed przystąpieniem do czyszczenia, zamknąć zawór pompujący, aby nie dopuścić do jego zamoczenia. W procesie suszenia nie używać źródeł ciepła.

Wymiary: 51 x 17 x 53 cm

Waga: 0,22 kg

Maksymalne obciążanie: 120 kg

Zawartość opakowania:

- poduszka
- pompka ręczna
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar