

## Protefix - krem mocujący do protez zębowych, hypoalergiczny - 47g

Cena: 22,90 pln



### Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Protefix hypoalergiczny krem z ekstraktem do mocowania protez zębowych. Zachowuje wszystkie właściwości oryginalnego kremu Protefix, ale nie zawiera barwników, konserwantów i substancji zapachowych co wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej.

### Właściwości:

- silne działanie mocujące
- utrzymuje siłę mocowania przez wiele godzin (nawet przy nadmiernym wydzielaniu śliny)
- daje komfort użytkowania
- zapewniający ochronę przed uciskiem i uszczelnienie

- odpowiedni dla osób podatnych na reakcje uczuleniowe

#### Stosowanie:

1. Krem nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
2. Małą ilość kremu nakładać (krótkimi odcinkami). Określenie jaka ilość kremu jest odpowiednia i nie wypłynie spod protezy może wynieść kilka prób.
3. Założyć protezę, przycisnąć ją i lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.

Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.

Po użyciu tubę dokładnie zamknąć, uważając by nie dostała się do niej woda i wilgoć, które po dostaniu się do wnętrza tubki mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

#### Skład:

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylnowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu.

Opakowanie: 47 g