

Protefix - krem mocujący do protez zębowych Premium Mocowanie - 47g

Cena: 19,50 pln



Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Protefix - krem mocujący Premium Mocowanie do protez zębowych - zapewnia szybką i niezawodną pomoc przy problemach z prawidłowym trzymaniem się protezy i daje komfort użytkowania przez cały dzień (8-12 godzin).

Właściwości:

- ekstra mocny
- skutecznie uszczelnia
- ziołowa formuła z szałwią, rumiankiem i mirrą
- ma świeży i łagodny miętowy smak
- zawartość witaminy E sprzyja pielęgnacji dziąseł
- długotrwały komfort

Stosowanie:

1. Protezę i błonę śluzową jamy ustnej wyczyścić z resztek pokarmu
2. Krem mocujący nakładać krótkimi odcinkami na oczyszczoną protezę zębową (suchą lub mokrą) stosując się do zaleceń z instrukcji
3. założyć protezę, docisnąć ją przez kilka sekund i lekko przygryźć.

Przed przyjęciem posiłku odczekać 5 minut.

Przy nakładaniu kremu unikać nałożenia nadmiernej ilości, gdyż może to osłabić skuteczność działania produktu.

Po użyciu tubę z staraniem zamknąć, unikając dostania się do jej wnętrza wilgoci, która może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Resztki kremu można usunąć za pomocą wacika nasączonego olejem jadalnym.

Preparat należy stosować tylko tymczasowo.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Skład:

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru, PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, wyciąg z rumianku pospolitego, octan tokoferylu, mirra, wyciąg z szalwii lekarskiej, mleczan mentylu, wyciągu z mięty, CI 14720.

Opakowanie: 47 g