

# Protefix - krem mocujący do protez zębowych XXL - 94g (2x47g)



Cena: 28,30 pln

## Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Protefix - krem mocujący do protez zębowych w ekonomicznym opakowaniu.

Zapewnia szybką i niezawodną pomoc przy problemach z prawidłowym trzymaniem się protezy.

### Stosowanie:

1. Krem nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
2. Małą ilość kremu nakładać (krótkimi odcinkami). Określenie jaka ilość kremu jest odpowiednia i nie wypłynie spod protezy może wynieść kilka prób.
3. Założyć protezę, przycisnąć ją i lekko przygrzyć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.

Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa to na siłę mocującą kleju.

Po użyciu tubę dokładnie zamknąć, uważając by nie dostała się do niej woda, która po dostaniu się do wnętrza tubki może spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Podczas prawidłowego użytkowania kremu może dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

**Właściwości:**

- ekstra mocny do protez zębowych
- odznacza się dużą siłą mocowania przez wiele godzin (nawet przy nadmiernym wydzielaniu śliny)
- natychmiast aktywny
- dający długotrwały komfort
- zapewniający ochronę przed uciskiem i uszczelnienie

**Czyszczenie protezy i jamy ustnej:**

Jamę ustną wypłukać wodą

Protezę delikatnie poruszyć i ją wyjąć.

Jeśli na protezie lub w jamie ustnej pozostają resztki kremu, należy je usunąć za pomocą wacika zwilżonego ciepłą wodą lub olejem jadalnym.

Dziąsła i podniebienie delikatnie oczyścić przy pomocy miękkiej szczoteczki.

**Skład:**

mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu

**Opakowanie:** 94 g (2x47 g)

