

Pulsoksymetr napalcowy Timago M70

Cena: 49,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Timago
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Łatwy w obsłudze, niewielki pulsoksymetr napalcowy z dużym wyświetlaczem LCD przeznaczony do pomiaru nasycenia krwi tętniczej tlenem (SpO2) i tętna. Urządzenie odpowiednie do użytku zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalach i placówkach szpitalnych.

Produkt jest lekki, waży zaledwie 54g i może być zawieszony na szyi przy użyciu dołączonej smycz ułatwiającej użytkowanie, która pozwala na dokonanie pomiaru w dowolnym momencie i warunkach.

Właściwości:

Prosty i wygodny w obsłudze

Wynik pomiaru wyświetlany po kilku sekundach po nałożeniu na palec i przyciśnięciu przycisku;

Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie SpOP2 0~100%;

Przycisk pozwalający na obracanie wyświetlanego wyniku (odwracanie w płaszczyźnie poziom-pion);

Wskaźnik stanu baterii;

Funkcja automatycznego wyłączenia;

Wyraźny wyświetlacz LCD.

Sposób użycia:

1. Przed pierwszym użyciem włożyć baterie AAA do kasety na baterie.
2. W otworze pulsoksymetru umieścić jeden z palców tak aby powierzchnia paznokcia była skierowana do góry.
3. Włączyć pulsoksymetr - nacisnąć przycisk funkcyjny na panelu przednim.
4. Podczas pomiaru nie wykonywać żadnych ruchów palcem ani całym ciałem.
5. Odczytać wynik na wyświetlaczu.

Pulsoksymetr nie nadaje się do długotrwałego monitorowania pacjenta w sposób ciągły.

Uwaga: pomalowane lakierem lub sztuczne paznokcie mogą dać zafałszowany wynik testu.

Produkt można dezynfekować za pomocą szmatki zwilżonej izopropanolem 70%. Obudowę pulsoksymetru należy chronić przed zanieczyszczeniami i można ją wycierać miękką, nieaktywną szmatką. Na urządzenie nie należy wylewać płynu ani go moczyć.

Wyrób należy dezynfekować tylko w razie konieczności, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Przed czyszczeniem i dezynfekcją należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć baterie.

Parametry techniczne:

Typ wyświetlacza: LCD

Zakres pomiaru saturacji: 0% - 100% (dokładność: $\pm 2\%$ przy 70%-100%; $\pm 3\%$ przy 0%-69%)

Czas aktualizacji danych: < 13 sekund

Zakres pomiaru tętna: 25-250 bpm (dokładność: ± 2 bpm)

Rozdzielczość: 1 uderzenie na minutę

Funkcja automatycznego wyłączenia: Tak

Wskaźnik stanu baterii: Tak

Waga: 54g

Wymiar (długość x szerokość x wysokość): 57x34x30mm

Zawartość opakowania:

- pulsoksymetr
- 2 baterie AAA
- smycz
- instrukcja obsługi w języku polskim

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Galeria

