


Rurka tracheostomijna z zapasowym wkładem DEMED IV, z otworem

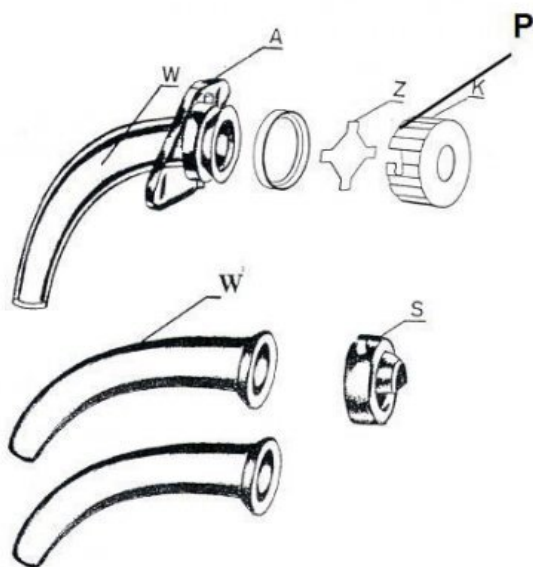

Cena: 259,00 pln

Opis słownikowy

Producent	DEMED
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	T.02.01
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Przeznaczenie rurek tracheostomijnych:

Rurki tracheostomijne z polietylenu są przeznaczone do stosowania u chorych po usunięciu krtani oraz w leczeniu zmian chorobowych wywołanych dusznością krtaniową np. podczas radioterapii nowotworów

krtani i gardła dolnego, kiedy wykonanie tracheostomy i zastosowanie rurki tracheostomijnej przywraca właściwą drożność drogi oddechowej. Rurki mogą być stosowane okresowo lub w sposób ciągły. Materiał i kształt rurek nie powoduje zmian śluzówki tchawicy przy długotrwałym stosowaniu.

Charakterystyka rurek tracheostomijnych:

Kompletny zestaw składa się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem

i kapturka osłonowego. Koniec rurki zewnętrznej jest lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy. Zestawy są pakowane w torebki foliowo-papierowe po jednej sztuce i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO).

Polecamy również akcesoria do rurek tracheostomijnych.

Zawartość zestawu

Elementy składowe	Zestaw
Rurka zewnętrzna bez otworu	1 szt.
Rurka zewnętrzna z otworem	1 szt.
Rurka wewnętrzna bez otworu	2 szt.
Rurka wewnętrzna z otworem	1 szt.
Kapturek osłonowy	1 szt.
Kapturek osłonowy z kratką	1 szt.
Kapturek zwykły	1 szt.
Zatyczka	1 szt.
Tasiemka mocująca	1 szt.

Rozmiary rurek tracheostomijnych

W zależności od średnicy zewnętrznej otworu dystalnego (od strony pacjenta) wytwarza się osiem różnych rozmiarów rurek oznaczonych symbolami od 5 do 12.

Długość rurek tracheostomijnych

W zależności od długości rurki dzielą się na standardowe (S), przedłużone (L) i długie (LL).

Odmiany rurek

Rurki, niezależnie od rozmiaru i długości, mogą występować bez otworu w środkowej części rurki zewnętrznej (oznaczone symbolem A) i z otworem (oznaczone symbolem B)

Wymiary rurek w milimetrach (wartości nominalne)

Rozmiar				
		5	6	7
S (standardowe)	średnica zewnętrzna końca rurki / długość	9 / 60	10 / 65	11 / 70
L (przedłużone)	średnica zewnętrzna końca rurki / długość	8,7 / 80	9,5 / 85	10,5 / 90
LL (długie)	średnica zewnętrzna końca rurki / długość	8,5 / 105	9 / 130	10,5 / 130

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Parametry

Rozmiar	LL (0,00 pln), S (0,00 pln), L (0,00 pln)
Wersja	10 (0,00 pln), 11 (0,00 pln), 12 (0,00 pln), 5 (0,00 pln), 6 (0,00 pln), 7 (0,00 pln), 8 (0,00 pln), 9 (0,00 pln)