

Sanyrene olejek do pielęgnacji skóry - 50ml



Cena: 60,70 pln

Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Olejek do pielęgnacji skóry Sanyrene, w postaci bogatego w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany: 99%) i zawierającego aromat anyżkowy (1%) łatwego do użycia sprayu w zabezpieczonej przed otwarciem buteleczce.

Produkt przeznaczony do miejscowego stosowania zewnętrznie na skórę. Produkt wskazany jest w celu zapobiegania ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych zwłaszcza u pracowników służby zdrowia oraz zapobiegania odleżynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na powstanie odleżyn.

Sanyrene ma działanie zmiękczające na skórę, która jest bardziej elastyczna oraz pomaga utrzymać odpowiednie dotlenienie skóry podczas ucisku.

Sposób użycia:

Produkt do użytku zewnętrznego tylko na skórę.

Zapobieganie odleżynom

1. Umyć ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonać pojedyncze rozpylenie preparatu na skórę w obszarze miednicy (okolice krętarzy, kości kulszowej i/lub kości krzyżowej).
3. Opuszkami palców delikatnie rozprowadzić olejek przez około minutę na skórze. Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie należy wykonywać intensywnego wcierania i masowania.
4. Miejscowe stosowanie SANYRENE musi następować razem z innymi czynnościami składającymi się na opiekę nad pacjentem (odciążanie, częste zmiany pozycji i mobilizację ciała, ochronę przed nadmierną wilgocią, regularne pełne kontrole stanu skóry, zabezpieczenie w związku z nietrzymaniem moczu, właściwe odżywianie).

Zapobieganie ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych

1. Umyć ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonać pojedyncze rozpylenie preparatu na palce.
3. Opuszkami palców delikatnie rozprowadzić olejek przez około minutę, w odpowiednich miejscach skóry twarzy (na nosie, policzkach, szczególnie na kościach policzkowych, wokół uszu i/lub na czole). Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie należy wykonywać intensywnego wcierania i masowania.

Produkt stosować należy 2-4 razy dziennie, przede wszystkim przy zmianie pozycji lub przed założeniem nowej maski ochronnej. Skuteczne zapobieganie urazom lub ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych wymaga regularnego i częstego stosowania preparatu.

Środki ostrożności:

W celu uniknięcia zakażenia mikrobiologicznego, zaleca się, aby nie używać tego samego opakowania u różnych pacjentów.

Produkt jest oleisty, przez co przed nałożeniem opatrunku lub bandaża na ranę w tym samym miejscu lub przed założeniem maski lub okularów ochronnych, gdzie naniesiono olejek, należy odczekać kilka minut.

Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności przy pacjencie.

Produktu nie stosować:

- w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na produkt lub jego składnik
- na rany.
- u dzieci.

Ostrzeżenia:

Preparat przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy natychmiast wypłukać usta; nie należy wywoływać wymiotów. Spożycie może mieć efekt przeczyszczający.

W przypadku kontaktu z oczami, ustami lub innymi błonami śluzowymi, natychmiast wypłukać preparat dużą ilością wody.

W przypadku powstania odleżyn lub innych ran należy przerwać stosowanie preparatu i podjąć odpowiednie działanie

Aby uniknąć uszkodzenia skóry, szczególnie u pacjentów narażonych na odleżyny nie masować ani wcierać preparatu w skórę.

W przypadku pojawienia się długotrwałego zaczerwienienia lub nietypowego wyglądu skóry należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

W związku z zawartością aromatu w produkcie może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nieoporzędzonych należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki z rozpylaczem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia lub żaru.

Opakowanie: 50 ml

UWAGA: krótki termin ważności 28.02.2025