

Taśma do tapingu kinesiologii Rea Tape Premium 5cm x 5m - niebieska

Cena: 33,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Rea Tape
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Taśma do tapingu Rea Tape Premium to wysokiej jakości produkt wykonany z zapewniającej jedwabistą gładkość i wytrzymałość tkaniny rayon shine, charakteryzującej się bardziej błyszczącym wykończeniem.

Rozciągliwość taśmy wynosi do 140%, jest rozciągliwa tylko w jednym kierunku odwzorowując zachowanie ludzkiej skóry, a jej konstrukcja zapewnia elastyczność podobną do mięśni.

Taśmę pokrywa warstwa mało drażniącego kleju o dużej przyczepności i odporności.

Tape charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza i wilgoci. Jest łatwy do docięcia do wymaganej wielkości lub długości oraz dozowania dzięki wygodnemu, plastikowemu pojemnikowi.

Zmiana taśmy na nową wskazana jest w momencie kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe cięcie nawet początkującym użytkownikom.

W przypadku silnie owłosionej skóry, należy ją w oklejanym miejscu uprzednio ogolić. Nie stosować na zranioną lub podrażnioną skórę. Podczas zdejmowania taśmy nie należy zrywać szybkim ruchem, ponieważ może to spowodować zerwanie górnej warstwy naskórka. Taśma łatwo schodzi po nawilżeniu oliwką, odpowiednim preparatem lub po 20 minutowej kąpieli.

Taśmy do kinesiotalingu są często stosowane przez sportowców, trenerów, osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być np. dodatkowym wsparciem podczas treningów.

Kinesiotaling ma znaczny wpływ na procesy leczenia, dlatego wykorzystywany jest również przez fizjoterapeutów podczas rehabilitacji, ortopedii, traumatologii, reumatologii, onkologii, neurologii, ginekologii i pediatrii. Pomaga zmniejszyć ból a także wpływ na obrzęki i

zastoje limfy.

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: niebieski

Właściwości:

- elastyczność: 130-140%
- posiada linie ułatwiające cięcie
- mało drażniący skórę klej
- wytrzymałość kleju: do 5 dni
- materiał: rayon
- wodoodporna
- hipoalergiczna
- nie zawiera lateksu

Zastosowanie:

- ochrona stawów
- ochrona mięśni przed nadmiernym obciążeniem
- korygowanie powięzi
- usprawnienie układu proprioceptorycznego
- tłumienie bólu
- zmniejszenie obrzęku limfatycznego i zapalnego
- zmniejszenie krwiaków
- stymulowanie mięśni hipotonicznych
- wpływanie na zakres ruchu
- zmniejszenie hipertonii mięśni
- wielorakie zastosowanie np. na szyję, bark, stopę, kolano, plecy, łokieć, nadgarstek

Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej w sprayu Rea Tape Glue, klej Pre Tape, zmywacz kleju Tape&Tuffner Remover

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl