

Taśma do tapingu kinesiologii Rea Tape Ultra Strong 5cm x 5m - czerwona

Cena: 31,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Rea Tape
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Taśma do tapingu Rea Tape Ultra Strong to wysokiej jakości z podwójną warstwą kleju wykonany z przepuszczającej powietrze bawełny bez zawartości lateksu, tkanego tak by odwzorowywał ludzką skórę i jej elastyczność.

Rozciągliwość taśmy wynosi do 140%, jest rozciągliwa tylko w jednym kierunku podobnie jak skóra, a jej konstrukcja zapewnia elastyczność podobną do ludzkich mięśni.

Taśmę pokrywa podwójna warstwa mało drażniącego kleju o dużej przyczepności i odporności.

Tape charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza i wilgoci. Jest łatwy do docięcia do wymaganej wielkości lub długości.

Zmiana taśmy na nową wskazana jest w momencie kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe cięcie nawet początkującym użytkownikom.

W przypadku silnie owłosionej skóry, należy ją w oklejanym miejscu uprzednio ogolić. Nie stosować na zranioną lub podrażnioną skórę. Podczas zdejmowania taśmy nie należy zrywać szybkim ruchem, ponieważ może to spowodować zerwanie górnej warstwy naskórka. Taśma łatwo schodzi po nawilżeniu oliwką, odpowiednim preparatem lub po 20 minutowej kąpieli.

Taśmy do kinesiotalingu są często stosowane przez sportowców, trenerów, osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być np. dodatkowym wsparciem podczas treningów.

Kinesiotaling ma znaczny wpływ na procesy leczenia, dlatego wykorzystywany jest również przez fizjoterapeutów podczas rehabilitacji, ortopedii, traumatologii, reumatologii, onkologii, neurologii, ginekologii i pediatrii. Pomaga zmniejszyć ból a także wpływ na obrzęki i zastój limfy.

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: czerwony

Właściwości:

- elastyczność: 130-140%
- posiada linie ułatwiające cięcie
- akrylowa warstwa z mało drażniącym klejem
- podwójna warstwa kleju
- wytrzymałość kleju: do 5 dni
- oddychający materiał: bawełna
- wodoodporna
- hipoalergiczna
- nie zawiera lateksu

Zastosowanie:

- ochrona stawów
- ochrona mięśni przed nadmiernym obciążeniem
- korygowanie powięzi
- usprawnienie układu proprioceptorycznego
- tłumienie bólu
- zmniejszenie obrzęku limfatycznego i zapalnego
- zmniejszenie krwiaków
- stymulowanie mięśni hipotonicznych
- wpływanie na zakres ruchu
- zmniejszenie hipertonii mięśni
- wielorakie zastosowanie np. na szyję, bark, stopę, kolano, plecy, łokieć, nadgarstek

Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej w sprayu Rea Tape Glue, klej Pre Tape, zmywacz kleju Tape&Tuffner Remover

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl