

Terapeutyczna chłodząco-grzejąca opaska na kolano Pakcare

Cena: 89,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Terapeutyczna opaska chłodząco-grzejąca na kolano zapinana na rzep będąca praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych, także w przypadku uczucia ciężkości po długotrwałym wysiłku fizycznym lub bóli reumatycznych i zwyrodnieniowych.

Kompres zapinany jest na rzep, dzięki czemu można go dobrze dopasować do nogi. Jego zaletą jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Opaska ma uniwersalny rozmiar. Wypełniona została hydrożelem, który dopasowuje się do kształtu nogi, zapewniając wygodę i komfort użytkowania.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie i krążenie w obrębie stawu kolanowego, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- stany zapalne i obrzęki w okolicy kolana np. zapalenie ścięgien, kaletki
- ból i obrzęk po urazach i pooperacyjny
- łagodzenie bólu i uczucia ciężkości po długotrwałym wysiłku fizycznym
- urazy sportowe i przeciążenia
- skręcenia, stłuczenia i zwichnięcia stawu kolanowego

Jako kompres grzejący:

- rozluźnienie mięśni po wysiłku lub treningu
- poprawa krążenia w obrębie stawu skokowego
- przewlekłe bóle zwyrodnieniowe i reumatyczne
- sztywność mięśni w obrębie stawu kolanowego
- wspomaganie regeneracji po intensywnym użytkowaniu stawu kolanowego

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Elastyczny materiał dopasowujący się do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić opaskę w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć opaskę na nogę, dopasowując przy użyciu zapięcia na rzep do kolana.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać opaskę w kuchence mikrofalowej (ok. 35-45 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć opaskę na nogę, dopasowując przy użyciu zapięcia na rzep do kolana.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 56 x 28 cm
- Waga: 640 g
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm – delikatny i elastyczny materiał kompresyjny
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

