

Terapeutyczne chłodząco-grzejące buty Pakcare

Cena: 149,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Terapeutyczne buty chłodząco-grzejące na stopy z zapięciem na rzep w górnej części będące praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Kompres ma uniwersalny rozmiar. Wypełniony jest hydrożelem który dopasowuje się do kształtu stóp, zapewniając wygodę i komfort użytkowania.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych, także w przypadku uczucia ciężkości po długotrwałym wysiłku fizycznym, treningu, długim chodzeniu lub pracy stojącej oraz bólu reumatycznego i zwyrodnieniowego.

Kompres w formie butów zapinany jest na rzep, dzięki czemu można je dobrze dopasować do stóp. Ich zaletą jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, buty mogą pomóc ogrzać stopy w okresie jesienno-zimowym, rozluźnić mięśnie i krążenie w stopach, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- ból, obrzęk i opuchlizna stóp
- wsparcie w profilaktyce otarć i odcisków
- łagodzenie bólu towarzyszącego zapaleniom lub po urazach
- zmniejszenie dyskomfortu u osób z problemami stawu skokowego lub płaskostopiem
- uczucie zmęczenia i przeciążenia stóp po długotrwałym chodzeniu lub staniu

Jako kompres grzejący:

- rozluźnienie mięśni stawów stóp po wysiłku
- poprawa krążenia w stopach
- przewlekłe bóle reumatyczne i zwyrodnieniowe
- wspomaganie regeneracji po urazach lub intensywnym treningu
- działanie odprężające i relaksacyjne podczas noszenia

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Zapięcie na rzep umożliwiające dopasowanie do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić buty w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć buty na stopy i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać buty w kuchence mikrofalowej (ok. 50-70 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się, że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć buty na stopy i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Opakowanie: 2 sztuki (para)
- Rozmiar: 30 x 16 cm
- Waga: 600 g / 2 sztuki
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

