

Terapeutyczny chłodząco-grzejący pas lędźwiowy Pakcare

Cena: 99,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Balanssen
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Terapeutyczny pas lędźwiowy chłodząco-grzejący z zapinaniem na rzep będący praktycznym rozwiązaniem, które łączy terapię ciepłem i zimnem w jednym produkcie.

Kompres ma uniwersalny rozmiar, który zapewnia komfort użytkowania przy obwodzie w pasie do 120 cm. Wypełniony jest hydrożelem który dopasowuje się do krzywizny pleców, zapewniając wygodę i komfort użytkowania.

Produkt idealnie sprawdza się w przypadku bólu, urazów i obrzęków pooperacyjnych, także w celu wspomagania regeneracji po długotrwałym wysiłku fizycznym, treningu lub bólu reumatycznym i zwyrodnieniowym kręgosłupa.

Opaska zapinana jest na rzep i posiada rozciągliwą taśmę, dzięki czemu można ją dobrze dopasować do ciała. Jej zaletą jest możliwość stosowania zarówno w terapii zimnem, jak i ciepłem oraz dopasowanie zastosowania do indywidualnych potrzeb i dolegliwości.

Dzięki możliwości użycia jako produkt grzejący, opaska pomaga rozluźnić mięśnie i krążenie w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, natomiast działanie chłodzące sprzyja w zmniejszeniu opuchlizny i obrzęków np. po urazach lub przebytych zabiegach chirurgicznych.

Wskazania:

Jako kompres chłodzący:

- stany zapalne mięśni pleców i w obrębie kręgosłupa
- urazy sportowe i przeciążeniowe
- łagodzenie bólu i uczucia ciężkości po długotrwałym wysiłku fizycznym
- ból i obrzęk po urazach i pooperacyjnych
- stłuczenia i urazy w okolicy lędźwiowej

Jako kompres grzejący:

- rozluźnienie mięśni po wysiłku fizycznym
- poprawa krążenia w obrębie dolnej części pleców
- przewlekłe bóle reumatyczne i zwyrodnieniowe
- sztywność mięśni lędźwiowych i pleców
- wspomaganie regeneracji po urazach lub intensywnym treningu

Właściwości:

- Do terapii na zimno i ciepło
- Możliwość wielokrotnego używania
- Wiele możliwości zastosowania
- Zapięcie na rzep umożliwiające dopasowanie do ciała
- Łatwość i komfort użytkowania
- Uniwersalny rozmiar (do 120 cm obwodu brzucha)

Zastosowanie:

Jako produkt chłodzący:

1. Umieścić pas w lodówce lub zamrażarce na co najmniej 2 godziny.
2. Przed założeniem należy upewnić się, że temperatura nie jest zbyt niska. Nie ma potrzeby stosowania tkaniny pomiędzy produktem a skórą.
3. Nałożyć pas tak aby kompres chłodzący znajdował się na plecach i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, nie dłużej niż 30 minut w jednej sesji.
5. W razie potrzeby, można powtarzać kilka razy dziennie.

Jako produkt grzejący:

1. Podgrzać pas w kuchence mikrofalowej (ok. 30-40 sekund) - czas zależny jest od mocy mikrofalówki (zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta).
2. Sprawdzić temperaturę i upewnić się że nie jest zbyt wysoka.
3. Nałożyć pas tak aby kompres grzejący znajdował się na plecach i dopasować przy użyciu zapięcia na rzep.
4. Stosować przez 15-20 minut, do momentu wygaśnięcia efektu ciepłego.

Środki ostrożności:

Nie przykładać do uszkodzonej skóry.

U osób z zaburzeniami czucia lub naczyń, kobiet w ciąży lub w przypadku chorób przewlekłych, użycie produktu należy skonsultować z lekarzem.

Nie przegrzewać ani nie przemrażać produktu, zawsze sprawdzać temperaturę przed nałożeniem.

Specyfikacja:

- Rozmiar: 47 x 24 cm
- Waga: 590 g
- Materiał wewnątrz: hydrożel 8 mm – delikatny i elastyczny materiał kompresyjny
- Materiał zewnątrz: nylon, spandex

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Producent i osoba odpowiedzialna w UE:

Bifarm Sp. z o.o.

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

Polska

info@bifarm.pl

Galeria

