

Termofor gumowy w kolorowym pokrowcu Halcamp 2L



Cena od: 28,30 pln

Opis słownikowy

Producent	HALCAMP
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Gumowy termofor w kolorowym i miłym w dotyku pokrowcu z miękkiej tkaniny o objętości 2 litry.

Termofor wykonany z naturalnej, wysokojakościowej i bardzo wytrzymałej gumy bez niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia związków, szczelność zapewnia korek z gumową uszczelką. Wyrób posiada certyfikat BS 1970:2012.

Wyrób używany jest w celach profilaktycznych, do miejscowego ogrzewania ciała ludzkiego i należy używać go zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego egzemplarza.

Sposób użycia:

Napełnić zimną wodą, zakręcić korek i sprawdzić szczelność i wylać wodę. W przypadku wystąpienia wycieku nie używać wyrobu.

Przed pierwszym użyciem wyparzyć termofor gorącą wodą.

Termofor trzymać w pozycji pionowej za otwór wlewowy, co pomoże uniknąć rozpryskiwaniu się wody i powoli go napełnić do 3/4 objętości wodą o temperaturze nieprzekraczającej 60°C.

Przez delikatne dociśnięcie i pochylanie termofora do momentu gdy w wylocie pojawi się woda, wypuścić nadmiar powietrza. Zakręcić termofor za pomocą korka aby uniemożliwić wyciekanie wody i sprawdzić szczelność.

Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po 5-10 minutach od napełnienia.

Po użyciu odkręcić korek, wylać wodę i pozostawić termofor otwarty, skierowany wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Przechowywanie:

Przechowywać bez zakręcania korka w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzenia, termofor i (lub) pokrowiec myć ciepłą wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących, organicznych rozpuszczalników i innych agresywnych środków chemicznych.

Ostrzeżenia:

Do napełniania termoformy nie używać wrzącej wody - może to spowodować uszkodzenie termoformy.

Unikać silnego nacisku np. siadania na termoformę - może to spowodować pęknięcie.

Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony lub w przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń, które pojawią się na jego powierzchni.

Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na części ciała, które będą miały kontakt z termoformą. W takiego przypadku kontaktu umyć termoformę wodą z mydłem.

Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi i u niemowląt. U dzieci stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej.

Termoforma napełniona gorącą wodą może spowodować oparzenia

Kolor: czerwony, niebieski, zielony, fioletowy

Tkanina: miękka, typu polar.

Pojemność: 2L

Producent:

Halcamp

ul. Spółdzielcza 9-11

55-080 Kąty Wrocławskie

biuro@halcamp.pl

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: FHU PRO-DENT Jacek Kuźniar

Warianty produktu



Niebieski

28,30 pln



Fioletowy

28,30 pln



Zielony

28,30 pln



Czerwony

28,30 pln