

Termofor w futerkowym pokrowcu APTEO 2L



Cena: 34,70 pln

Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Termofor gumowy 2l w puszystym futerkowym pokrowcu. Stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia bólu. Dzięki pluszowemu pokrowcowi jest przyjemny w dotyku i idealny dla wrażliwej skóry.

Sposób użycia:

Termofor trzymać w pozycji pionowej za otwór wlewowy, co pomoże uniknąć rozpryskiwaniu się wody i powoli go napełnić do 3/4 objętości.

Za pomocą korka zakręcić termofor aby uniemożliwić wyciekanie wody.

Przed użyciem sprawdzić szczelność.

Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po 5-10 minutach od napełnienia.

Po zakończeniu użytkowania odkręcić korek, wylać wodę i pozostawić termofor otwarty, skierowany wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzenia, termofor i (lub) pokrowiec myć letnią wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Ostrzeżenia:

Do napełniania termoforu nie używać wrzącej wody - może to spowodować uszkodzenie termoforu.

Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować pęknięcie.

Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony lub w przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń, które pojawią się na jego powierzchni.
Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na części ciała, które będą miały kontakt z termoforem. W takiego przypadku kontaktu umyć termofor wodą z mydłem.
Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi i u niemowląt. U dzieci stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej.
Termofor napełniony gorącą wodą może spowodować oparzenia

Pokrowiec: pluszowy

Pojemność: 2L

Kolor: szary