

Termofor XXL w futerkowym pokrowcu Ruhhy 3,5L



Cena: 39,00 pln

Opis słownikowy

Producent

Ruhhy

Opis produktu

Termofor gumowy o dużej pojemności 3,5l w puszystym futerkowym pokrowcu, który jest przyjemny w dotyku i idealny dla wrażliwej skóry.

Stosowany w celach profilaktycznych do ogrzewania ciała i łagodzenia bólu, także związanego ze skurczami mięśni.

Termofor posiada certyfikat BS1970:2012 - zintegrowany standard bezpieczeństwa dla termoforów.

Sposób użycia:

Przygotować ciepłą, ale nie wrzącą wodę.

Odkręcić nakrętkę i trzymając termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy, co pomoże uniknąć rozpryskiwaniu się wody, powoli go napełnić do 3/4 objętości.

Usunąć z termofora nadmiar powietrza i za pomocą korka zakręcić termofor aby uniemożliwić wyciekanie wody i sprawdzić szczelność odwracając go korkiem do dołu.

Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po 5-10 minutach od napełnienia.

Po zakończeniu użytkowania odkręcić korek, wylać wodę i pozostawić termofor otwarty, skierowany wlewem w dół do całkowitego wysuszenia.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzenia, termofor i (lub) pokrowiec myć letnią wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Ostrzeżenia:

Do napełniania termoforu nie używać wrzącej wody - może to spowodować uszkodzenie termoforu.

Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować pęknięcie.

Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony lub w przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń, które pojawią się na jego powierzchni.

Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na części ciała, które będą miały kontakt z termoforem. W takiego przypadku kontaktu umyć termofor wodą z mydłem.

Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi i u niemowląt. U dzieci i osób z chwilowo niepełnosprawnych ruchowo stosować tylko pod nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.

Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej.

Termofor napełniony gorącą wodą może spowodować oparzenia.

Pokrowiec: pluszowy

Pojemność: 3,5L

Wymiary: 41x23cm

Kolor: szary

Producent:

ISO TRADE Spółka z o.o.

ul. Hangarowa 15

59-220 Legnica, Polska

office@iso-trade.biz

Osoba odpowiedzialna w UE:

ISO TRADE Spółka z o.o.

ul. Hangarowa 15

59-220 Legnica, Polska

office@iso-trade.biz

Galeria

